



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO UPGRADE DE SOTWARE **APEX 2.3.2 OU QDR 12.6.2**

Observação: Este "Upgrade de Software" é para ser utilizado na atualização das versões APEX V 2.0, V 2.1 ou V 2.3.1 para a APEX V 2.3.2 ou da versão QDR 12.6 para a QDR 12.6.2 (conforme equipamento em uso)

- 1) Logar como QDR no sistema (se ainda não estiver em QDR)
- 2) Arquivar todos os exames, por precaução.
- 3) Realizar um "System Backup", por precaução.
- 4) Sair do QDR sem desligar o sistema, clicando em "Exit" e selecionando a opção "Exit QDR without shutdown".
- 5) Inserir o CD do APEX 2.3.2 ou QDR 12.6.2 (conforme o fornecido), no computador.
- 6) Clicar em: Start >, Run >, Browse > e depois selecione o drive do CD-ROM.
- 7) Dentro do CD-ROM, terá uma pasta chamada "Drivers"; Abrir com dois clicks, e novamente dentro desta pasta terá outra pasta chamada "HolxRTSS & Permissions; Abrir também clicando em setup>, open> e OK> .
- 8) Uma tela chamada "Install Program as other User" se abrirá; No campo "User Name" selecionar a opção "Admin" e no campo "password" digitar a senha; password; clicar em "OK"
- 9) Abrirá uma outra tela chamada "Install Shield Wizard". Clicar em "Next"
- 10) Confirmar todas as demais telas que possam aparecer na seqüência clicando "next" e/ou "OK".
- 11) Ao final, clicar novamente em Start>, Run>, e no campo "Open" digitar: D:setup; Clicar em "OK".
- 12) Repita o passo do item 8.
- 13) Quando uma tela chamada "Install Shield Wizard" aparecer pela segunda vez, selecione a opção: Update APEX software e clique em "Next".
- 14) Na tela seguinte, certifique-se que todas as opções estão selecionadas, clique em "next".
- 15) Aguardar até o final da instalação. Aparecerá outra tela pedindo para reiniciar o computador; Remova o CD e clique em "Finish".
- 16) Após o "Reboot" do sistema, faça o login como usuário do QDR.

 **Pyramid Medical Systems**

- 17) Navegue até a barra do APEX e clique em "Help", depois em "About APEX". Aparecerá uma tela confirmando a versão do Software instalado na máquina. Clique em OK.
- 18) O último passo no processo de atualização é fazer um novo "System Backup". Este seria equivalente a última versão instalada. Guarde-o em local seguro.