

Posicionamento correto do equipo na bomba de infusão enteral APPLIX SMART

Prezado cliente


No intuito de prevenir o risco potencial de fluxo livre devido ao posicionamento incorreto do equipo na bomba APPLIX SMART estamos reforçando, através desse folheto, as instruções necessárias à sua correta instalação.

A. Destrave e abra a porta da bomba com a alavanca da porta

B. Coloque o clamp do equipo na posição indicada na bomba de acordo com marca da seta, mantendo-o destravado

C. Posicione o tubo sobre o mecanismo peristáltico da bomba fixando-o no encaixe (guia) situado logo abaixo do referido mecanismo. Assegure-se que o tubo esteja posicionado em linha reta, ligeiramente esticado, mas não tensionado.

D. Feche a porta da bomba assegurando-se que esteja corretamente travada.

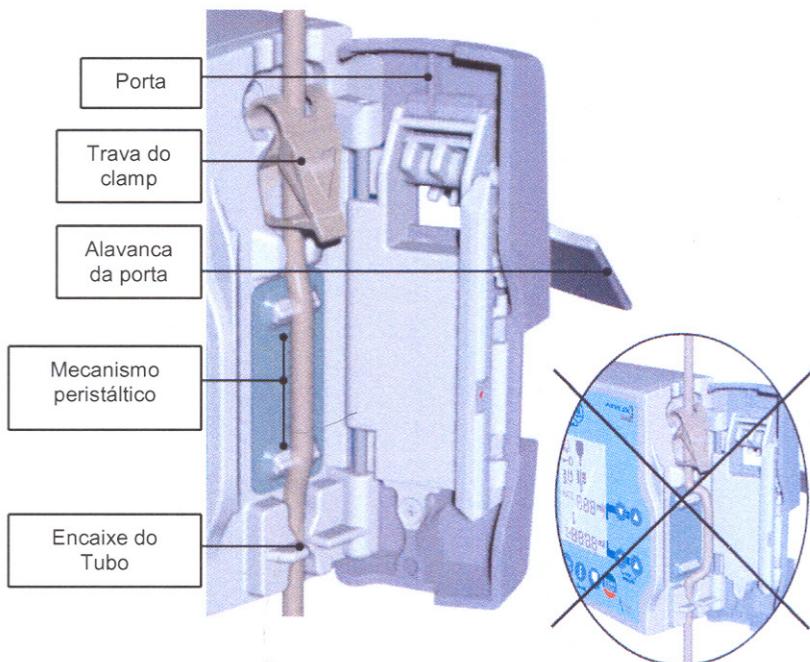

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

Dr Jean Gomes
Farmacêutico Responsável
CRF SP 6023

Terezinha Pereira
Gerente de Produtos
Tecnologia de infusão