

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA CLIENTES

Para todos os usuários do *syngo* Imaging XS

<Para a pessoa encarregada pela unidade onde o produto Siemens está sendo utilizado e para o gerente da organização.>

Nome	Primeiro nome/ sobrenome
Setor	
Telefone	
Fax	
Celular	
E-mail	xx.xx@siemens.com
Seu contato de Referente a	data assunto
Data	

– ***syngo* Imaging XS: As impressões anatômicas podem não ser impressas no tamanho correto I**

Prezado cliente:

Esta carta destina-se a informá-lo de um potencial problema ao utilizar o *syngo* Imaging XS e a impressão anatômica. As impressões anatômicas podem não ser impressas no tamanho correto.

Qual é o problema e quando ocorre?

As impressões podem ser impressas em tamanho anatômico incorreto se utilizar a aplicação de películas do *syngo* Imaging XS para imprimir em tamanho anatômico com uma impressora não adequada à impressão anatômica. Isto pode acontecer devido a uma combinação inválida de impressora e o arquivo de conversão de impressora do *syngo* Imaging XS.

As impressoras marcadas na lista anexa com “Yes” para impressão anatômica não serão afetadas por este problema.

Apenas estas impressoras são válidas para serem utilizadas em impressão anatômica. Considere também as restrições mencionadas na lista de impressoras.

Que passos pode tomar o usuário para evitar este problema?

Verifique se a impressora disponível no seu espaço se encontra na lista em anexo. Se a sua impressora não estiver na lista, a Siemens não garante a impressão do tamanho anatômico correto.

No geral, recomendamos que verifique as impressões anatômicas utilizando a régua na extremidade do lado direito da impressão. A distância entre duas linhas de graduação corresponde a um centímetro na anatomia representada. Calcule qualquer distância medida na impressão através desta escala.

Se possuir alguma outra impressora na sua instalação que não esteja adequada à impressão anatômica, contacte o seu Representante regional de vendas para receber a oferta de uma impressora especial valida.

Agradecemos a sua compreensão e cooperação neste conselho de segurança e solicitamos que instrua imediatamente os utilizadores a agir em conformidade. Inclua este aviso de segurança no manual do utilizador. No interesse da segurança, pedimos-lhe que tome as medidas preventivas acima referidas e que informe imediatamente todos os utilizadores afetados.

Caso tenha vendido este dispositivo/equipamento e já não se encontre na sua posse, pedimos-lhe que reencaminhe este aviso de segurança para o novo proprietário do mesmo. Caso o dispositivo/equipamento tenha um novo proprietário, por favor, comunique-nos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente e agradecemos de antemão a sua compreensão.

Com os melhores cumprimentos,

Gerente de Serviço Regional