

Instruções para colocar a etiqueta de lembrete de pressão para pulverização (spray) do EVICEL® no Regulador de Pressão Omrix:

- Limpe a superfície do Regulador de Pressão Omrix, usando um pano embebido em água morna e um detergente apropriado.
- Assegure que a superfície esteja seca após a limpeza, como mostrado na figura 1.
- Aplique a etiqueta, removendo a proteção do adesivo e colocando a ponta inicial da etiqueta alinhada com a indicação de pressão 0, como mostrado pela linha amarela na figura 2.

Figura 1:



Figura 2:

