



AVISO IMPORTANTE

Resultados equivocados de HbA1c em pacientes com gamopatias

Reagente	HbA1c kit (4190045K)
Justificativa	<p>Um cliente observou um valor falsamente elevado na análise da HbA1c quando o resultado da análise de um paciente avaliado com o reagente HbA1c IS (marca DiaSys) deu um valor de 10,4%. Como esse valor era improvável, a mesma amostra foi avaliada por HPLC, dando um valor de 7,5%.</p> <p>As investigações, para encontrar a causa do valor falsamente elevado de HbA1c quando testado por fotometria, resultaram no diagnóstico de Gamopatia Monoclonal Severa do paciente.</p>
Impacto nos resultados	Em casos muito raros, amostras de pacientes com gamopatias podem fornecer falsos resultados de HbA1c quando dosado por análises fotométricas.
Análises	As gamopatias são conhecidas por possivelmente causar turbidez inespecífica nas amostras do paciente devido à precipitação de proteínas, e por consequência, interfere nas análises fotométricas. Esses são casos muito raros e não podem ser evitados na maioria das vezes.

Esta informação já foi incluída nas instruções de uso do produto **HbA1c Kit**, assim como, em nosso website para conhecimento de todos.

Por favor, aceite nossas sinceras desculpas pelo inconveniente causado.

Em caso de dúvidas, por favor, não hesite em contatar-nos.

Atenciosamente,



R. Cristóvão Sardinha, 110
Jd. Bom Retiro – São Gonçalo/ CEP 24722-414
Tel: (21) 2623-1367, Fax: (21) 2623-1336