

GQ82

Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2016

Ao Gestor do Laboratório / Ao Diretor do Centro de Atenção de Saúde

**Referência : Ação corretiva de Campo - FSCA 3039**

**IMPORTANTE**

**AVISO DE SEGURANÇA DO PRODUTO**

**VIDAS® Estradiol II (ref. 30431)**

**Registro M.S.: 10158120172**

Prezado cliente bioMérieux,

Seu laboratório recebeu ou irá receber um ou mais kit's do produto VIDAS® Estradiol II ref 30431.

A bioMérieux tem conduzido uma investigação interna após a sequência de várias notificações recentemente publicadas por diferentes fabricantes MD-IVD, sobre o impacto da molécula de Fulvestrant® na avaliação do nível de estradiol.


**Descrição**

A droga Fulvestrant® tem mostrado recentemente reações cruzadas com avaliações de ensaios de estradiol no mercado. Isso ocorre devido a molécula Fulvestrant® ter uma estrutura química similar ao estradiol e ter reação cruzada com anticorpos usados no imunoensaio.

Seguindo uma investigação interna, foi confirmado que a molécula Fulvestrant® reage de forma cruzada e isto pode ter uma superestimação dos níveis de estradiol no kit VIDAS® Estradiol II teste ref.30431.

Tabela 1 : Dosagens de Estradiol obtidas com ou sem Fulvestrant® nos instrumentos VIDAS:

Instrumento	17 - $\beta$ - estradiol (pg/ml)	Controle sem Fulvestrant®	Amostra enriquecida com Fulvestrant® (20000pg/ml)	% of reatividade cruzada*
miniVIDAS	20	28.42	65.83	0.19
	200	171.01	230.13	0.30
VIDAS	20	28.99	62.73	0.17
	200	172.67	227.71	0.28
VIDAS 3	20	27.72	59.75	0.16
	200	169.47	229.89	0.30

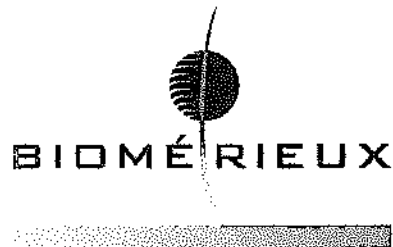

\* A média de todos os % de reatividade cruzada obtida em todas as corridas realizadas com os parâmetros definidos.

Um estudo de reatividade cruzada, realizada de acordo com os princípios do guideline CLSI EP7-A2 "Testes de interferência em Química Clínica; Guideline Aprovado - Segunda Edição", demonstrou que a porcentagem de reatividade cruzada obtida para Fulvestrant® é de no máximo 0,32% para uma concentração Fulvestrant® de 20.000 pg/mL.

Esse percentual foi calculado com a seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Valor médio de um pool de interferência (com Fulvestrant®)} - \text{valor médio para um pool de controle (sem Fulvestrant®)}}{\text{Concentração de material interferente}} \times 100$$

### **Impacto para o cliente:**

A reatividade cruzada observada induzida na presença de Fulvestrant® provoca uma superestimação do nível de estradiol quando testado com teste VIDAS® Estradiol II.

Considerando que Fulvestrant é indicado para:

1. O tratamento de hormônio receptor positivo de câncer de mama em mulheres pós-menopáusicas com câncer de mama as quais pioraram depois de terem sido tratadas com medicamentos anti-estrogênio tal como Tamoxifeno.
2. O tratamento de hormônio receptor positivo de câncer de mama em mulheres pós-menopáusicas com câncer de mama as quais pioraram depois de terem sido tratadas com medicamentos anti-estrogênio tal como Tamoxifeno.
3. Tratamento de hormônio receptor positivo, fator receptor de crescimento humano epidérmico 2 (HER2) avançado negativo ou câncer da mama metastático em combinação com Palbociclib em mulheres com doença progressiva após terapia endócrina.

Se o ensaio VIDAS® Estradiol II é utilizado para testes em mulheres pós meno-pausadas em tratamento com Fulvestrant®, tem-se um potencial de superestimação dos níveis de estradiol dos pacientes.

O resultado falsamente elevado do alto nível de estradiol pode resultar em má interpretação do resultado do paciente em pré-menopausa ou falha terapêutica e, possivelmente, alteração ou uso descontinuado de potenciais benefícios da droga Fulvestrant®.

### **Ações necessárias:**

- Distribua a informação para todas as pessoas pertinentes em seu Laboratório. Guarde uma cópia nos seus arquivos e encaminhe essa informação a todas as partes interessadas nesse produto, incluindo outros à quem você possa ter transferido nosso produto.
- Não use o teste do VIDAS® Estradiol II para testar níveis de estradiol em pacientes durante a terapia com Fulvestrant®.
- O assunto em questão está relacionado com o teste ref.30431 VIDAS® Estradiol II, incluindo o atual e os futuras lotes - ainda não lançados - até a carta de correção ser implementada.
- Discutir qualquer preocupação que você possa ter a respeito dos resultados anteriormente relatados com o seu Diretor Médico Laboratorial para determinar o plano de ação apropriado.
- Preencher e devolver o Formulário de Recebimento no anexo A por fax para confirmar o recebimento deste aviso.




A bioMérieux está empenhada em fornecer aos nossos clientes produtos da mais alta qualidade possível. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Se precisar de assistência adicional ou tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu representante local da Assistência bioMérieux.

Em caso de dúvidas sinta-se à vontade para contatar nosso Dept. de Atendimento Integrado ao Cliente através do número 0800-0264848 ou através do e-mail: [contato@biomerieux.com](mailto:contato@biomerieux.com)

Cordialmente

Raquel Raigorodski  
Coordenadora de Customer Service

Renato Leal  
Especialista de Customer Service

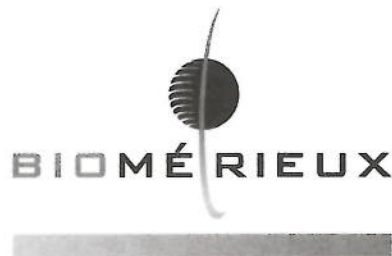

GQ83

Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2016

Prezados Distribuidor bioMérieux Brasil.

**Referência : Ação corretiva de Campo - FSCA 3039**

**IMPORTANTE**

**AVISO DE SEGURANÇA DO PRODUTO**

**VIDAS® Estradiol II (ref. 30431)**

**Registro M.S.: 10158120172**

Vimos comunicar e orientar V.Sa. quanto ao procedimento a ser empregado para realização do FSCA acima citado.

Trata-se de um comunicado a todos clientes que tenham adquirido um dos lotes abaixo referenciados e que venham a adquirir qualquer lote do produto Vidas Estradiol II, a partir desta data.

**Lotes: 1004403350, 1004343690, 1004490710, 1004661480, 1004666000.**

**Descrição do problema:**

Identificação de reação cruzada do kit com a droga Fulvestrant, comumente empregada no tratamento de pacientes com câncer de mama.

Solicitamos que V.Sa. leia atentamente a carta aos clientes que segue anexa a esta e que proceda conforme orientações abaixo.

- 1- Enviar a carta ao cliente para todos que tiverem adquirido um dos lotes acima.
- 2- Manter o envio da carta para todos os clientes que passem a adquirir o produto Vidas Estradiol II, até que V.Sa. receba comunicação do Dept. de Atendimento Integrado a Clientes , informando a partir de que lote a bula do produto já mencionará a questão da reação cruzada e que portanto não será mais necessário o envio da carta aqui citada.
- 3- **Favor remeter a carta resposta, dando ciência da recepção do FSCA, que segue em anexo para o e-mail abaixo.**

Informamos ainda que estamos dando ciência nesta data à ANVISA sobre o problema mencionado acima, bem como da relação de clientes que serão contatados por nós incluindo distribuidores.

**Solicitamos seu retorno com a comprovação dos contatos feitos com seus clientes até o dia 04/08/2016.**

Em caso de dúvidas sinta-se à vontade para contatar nosso Dept. de Atendimento Integrado ao Cliente através do número 0800-0264848 ou através do e-mail: [contato@biomerieux.com](mailto:contato@biomerieux.com)

Cordialmente

Raquel Raigorodski  
Coordenadora de Customer Service

Renato Leal  
Especialista de Customer Service

## SILVA Suelen

---

**De:** SILVA Suelen  
**Enviado em:** terça-feira, 26 de julho de 2016 10:58  
**Para:** Mary Barros - Gestao Qualidade (mary.barros@2aliancas.com.br); 'alysson.couto@2aliancas.com.br'  
**Cc:** REGINA Sandra; LEAL Renato; LOPES Priscila (priscila.lobes@biomerieux.com); NEVES Diogo; PEREIRA Alcinei  
**Assunto:** URGENTE: COMUNICAÇÃO A CLIENTES QUE ADQUIRIREM VIDAS ESTRADIOL II REF- 30431  
**Anexos:** FSCA 3039; FSCA 3039

Prezados Mary e Alysson, bom dia!

Solicito especial atenção para as correspondências em anexo deste e-mail. A carta endereçada à “**clientes bioMérieux**”, a partir dessa data, deverá ser anexada a cada DANFE emitida para expedição deste produto especificamente.

Ao Diogo e Alcinei, que nos leem em cópia, solicito que garantam o envio da carta aos clientes conforme acima referenciado.

Conforme V.Sa. verá no corpo da carta endereçada aos Responsáveis Técnico e de Qualidade O2Alianças, estamos dando ciência da ocorrência à ANVISA e bem como comunicando que esta é uma das ações a serem implementadas para darmos ciência aos clientes quanto a investigação feita pela matriz da bioMérieux na França.

Desde já muito grata por sua atenção a esta solicitação.

Att.



Suelen Silva  
bioMérieux | Diretora de Assuntos Regulatórios / Responsável Técnico  
[suelen.silva@biomerieux.com](mailto:suelen.silva@biomerieux.com)  
Phone: (55-21) 2444-1415 | Mobile: (55-21) 98143-3478 |  
Estrada Mapuá 491 Lote 1 - Taquara - Jacarepaguá, Rio de Janeiro 22713-320  
[www.biomerieux.com.br](http://www.biomerieux.com.br)

Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2016

Prezada Dra. Mary Barros / Dr. Alysson Couto

**Referência : Ação corretiva de Campo - FSCA 3039**

**IMPORTANTE**

**AVISO DE SEGURANÇA DO PRODUTO**

**VIDAS® Estradiol II (ref. 30431)**

**Registro M.S.: 10158120172**

Bom dia!

Solicitamos que V.Sa. proceda exatamente como descrito no item orientações abaixo, a fim de realizarmos uma das ações ligadas ao FSCA acima citado.

Trata-se de um comunicado a todos clientes que venham a adquirir um dos lotes abaixo referenciados e/ou qualquer outro lote do produto Vidas Estradiol II, a partir desta data.

**Lotes: 1004403350, 1004343690, 1004490710, 1004661480, 1004666000.**

**Descrição do problema:**

Identificação de reação cruzada do kit com a droga Fulvestrant, comumente empregada no tratamento de pacientes com câncer de mama.


**ORIENTAÇÕES:**

- 1- Manter o envio da carta anexada à DANFE, para todos os clientes que adquiram o produto Vidas Estradiol II, até que V.Sa. receba comunicação do Dept. de Atendimento Integrado a Clientes , informando a partir de que lote a bula do produto já mencionará a questão da reação cruzada e que portanto não será mais necessário o envio da carta aqui citada.

Informamos ainda que estamos dando ciência nesta data à ANVISA sobre a investigação aberta na matriz da bioMérieux – França, e desta ação a qual solicitamos que seja realizada por O2Alianças como co-responsável pelo estoque bioMérieux armazenado em suas instalações.

Em caso de dúvidas sinta-se à vontade para contatar nosso Dept. de Atendimento Integrado ao Cliente através do número 0800-0264848 ou através do e-mail: [contato@biomerieux.com](mailto:contato@biomerieux.com)



Cordialmente



Suellen da Glória Silva  
- Diretora de Assuntos Regulatórios /  
Farm. Resp. Técnica  
CRF-RJ: 5239

## Plano de Ação



<b>Título:</b> FSQA 3039 - VIDAS - Fulvestrant cross reaction with VIDAS Estradiol II (ref.30431)		<b>Data de início</b>	07/07/2016	<b>Previsão de encerramento</b>	07/08/2016		
<b>Objetivo:</b> Realizar as ações propostas da FSQA 3039		<b>PR ID</b> (trackwise)	NA				
<b>Responsável</b>	Renato Leal / Raquel Raigorodski / Suelen Silva		<b>Origem</b> <input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Fornecedor <input type="checkbox"/> Distribuidor <input checked="" type="checkbox"/> Outros: FSQA 3039 - ação Corporativa _____				
<b>Assinatura</b>	 		*Caso esteja ligado à auditoria, inserir número _____				
<b>Participantes da reunião inicial</b>	NA						
Nº	Etapa	Descrição da ação	Responsável	Follow up		Status	Comentários
				Data atual	26/07/2016		
	Análise da FSQA 3039 - VIDAS Fulvestrant cross reaction with VIDAS Estradiol II	Analisar a FSQA e verificar as ações requeridas	Renato Leal	09/07/2016	09/07/2016	Concluído	
1	VIDAS Estradiol II	Verificar os lotes afetados no Brasil e a rastreabilidade	Raquel Raigorodski	09/07/2016	09/07/2016	Concluído	
	Análise da FSQA 3039 - VIDAS Fulvestrant cross reaction with VIDAS Estradiol II	Traduzir carta ao cliente	Andrea Perez / Elizabeth Souza	25/07/2016	25/07/2016	Concluído	Carta traduzida e revisada pelo Gerente de Produto
1	VIDAS Estradiol II	Enviar da carta aos clientes que adquiriram os lotes afetados e aos futuros clientes que possam vir a comprar o kit Vidas Estradiol II	Raquel Raigorodski	26/07/2016		Em andamento	Aguardando a comunicação a ANVISA
2	Comunicação aos clientes	Comunicação aos Distribuidores quanto à necessidade de envio da carta para seus clientes que adquiriram e adquirirão o produto acima referenciado.	Raquel Raigorodski	26/07/2016		Em andamento	Aguardando a comunicação a ANVISA
3	Comunicação aos Distribuidores	Orientar o Responsável Técnico de 02Alianças Armazéns Gerais, quanto a necessidade de que todas as DANFES onde houver kit Vidas Estradiol II, sejam acompanhadas da carta acima.	Suelen Silva	26/07/2016	26/07/2016	Concluído	
4	Comunicação a 02 Alianças Armazens Gerais						

## Plano de Ação



5 Comunicação a ANVISA	Comunicar a ANVISA sobre as ações da FSCA 3039	Suelen Silva	26/07/2016	26/07/2016	Concluído	#REF1
<b>Conclusões sobre o Plano de Ação</b>						
<i>*A ser preenchida após finalização do plano de ação</i>						
<b>O objetivo do plano de ação foi alcançado?</b>		<b>Comentários</b>				
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO						
<b>Responsável pela avaliação</b>		<b>Data</b>		<b>Assinatura</b>		



MAPA DE RASTREABILIDADE - VIDAS ESTADIO II - REF: 30431 LOTE: 1084403360

Cliente	Endereço	Cidade	Uf	Telefone	Email	Quantidade
CEQA CENTRO DIAG DR JOSE U P NETO 04176	PRACA DA SE 39 CENTRO	CRATO	CE	86-35210914	pedra.kloerding@uol.com.br gertrudes_o.vieira@bol.com	1
CDC TECNOLOGIA SISTEMAS DIAGNOSTICOS 04588	AV FRANCISCO DE ANGELUS 186 JARDIM OITTA	CAMPINAS	SP	19-33033600	lrene@cdc.com.br; mrsmp@cdc.com.br	1
CDC TECNOLOGIA SISTEMAS DIAGNOSTICOS 04627	RUA CANDIDO JARDIMANO 890 CENTRO	GUARÁ	MT	19-33033600	mrsmp@cdc.com.br	1
CUN DA DANIELLA B C SIM OBSTETRICA 04491	Rua Guadalupe, 538 Jardim América	SÃO PAULO	SP	11-3051-0442	dan@centrodmh.com.br	1
INST PAULISTA GINECOL E OBSTETRICA Laboratório PCO 03927	Rua Adolfo Correa, 1125 - Perus	SÃO PAULO	SP	11-3057-0222	lab@pcoc.com.br	2
LABORE ANÁLISES CLÍNICAS 01532	RUA DOMINGOS BARBOSA APALUO 378 CALUANDA	BAHIA	BA	75-0623-8844	lab@labclin.com.br	1
LEMON LAB ANÁLISES CLÍNICAS SOC LTDA 00740	AV PRESIDENTE TANAR FRANCO 2261 SDO MANGUA	JUZ DE FORA	MG	0321 8488-7275 (032) 3215-2872	luciane@lemonlab.com.br	1
LFS SERVICOS MEDICOS LTDA 02735	RUA LAURO MULLER 116 GRUPO 1202 BOTAFOGO	RIO DE JANEIRO	RJ	21-25413355 21-25438688	lfs@lfsmed.com.br	6
ANÁLISES CLIN DR PAULO GURGEL LTDA 01136	RUA JUNDIAI 648, TIROL	NATAL	RN	94-321-1235 824-4108	lab@paulogurgel.com	1
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 00946	ST BRAS OD 301 CONJ A SIN ASA SUL	BRASILIA	DF	61-33191538	200297@seabn.br	2
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 01420	Av. LUIZ Rocha s/n. Monte Castelo	SÃO LUIS	Maranhão	99-3219-6284	5921@seabn.br	2
DIAG PRIME COM E DIST PRO CIENT LTDA 00279	R MESTRO HENRIQUE VOGELER 45 BRAS DE PINA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-35289550	marlene@diagprime.com.br	4
CUN PRO MASCEP ASS MED LABORATORIAL 03469	AV AVANANDO TORRES TORRES BLOCO 1 SALA 123 (BARRAULFE) BARBA DA TIJUCA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-3717853	prh@kva.com.br	1
QUÍMICAS COM REPR LTDA 00894	R MAZARENO ROHRZ 886 COLÍMPIO CASTELO BRANCO	GOVANIA	GO	62-35924489	quimicas@terra.com.br; qdrh@ig.com	5
SANDRA M O SILVA 01375	AV EDUARDES DA CUNHA 266 CENTRO	MACAPÁ	AP	99-3231297	sandra@hcardmefixa.com.br	1
SUJARA E TOYODA S C LTDA 00337	RUA GENERAL OSORIO 25 CENTRO	ARACATUBA	SP	16-30236140	lab@chagas@ig.com.br	1
SULLAB DIST PRODOS DIAS HOSP FARMACEU 01013	RUA QUINTO BOCAIUNA 27 L 14 FINESTR	PORTO ALEGRE	RS	5133023433	bellab@suilab.com.br	1

Realizada por: Raquel Raigorodski / Renata Leati

Data: 26/07/2016

KVA-Médica Brasil S/A  
Escada Mapud, n.º 461 - Jaconópolis - 22.713-320 - Rio de Janeiro, RJ  
Tel.: (21) 2444.1400



**Raquel Raigorodski**  
Coordenadora de Customer Service  
biométrieux Brasil



MAPA DE RASTREABILIDADE - VIDAS Estradiol II - REF: 30431 LOTE: 1004343690

Cliente	Endereço	Cidade	UF	Telefone	Email	Quantidades
COC TECNOLOGIA SISTEMAS DIAGNOSTICOS 04569	AV FRANCISCO DE ANGELUS 186 JARDIM OXITA	CAMPINAS	SP	19 33033800	lorne@cqc.com.br rosenaph@cqc.com.br	2
COC TECNOLOGIA SISTEMAS DIAGNOSTICOS 04627	RUA CANDIDO MARIANO 350 CENTRO	CUIABA	MT	19-33033800	rosenaph@cqc.com.br	1
CLIN DRA DANIELLA S C GIN OBSTETRICI 04401	Rua Gnefandia, 539 Jardim América	SÃO PAULO	SP	11-3051-8442	acim@castelitolli.com.br	2
INST PAULISTA GINECOL E OBSTETRICIA Laboratório IPGO 08927	Rua Abílio Soares, 1125 -Paraiso	SÃO PAULO	SP	11 3057-0222	lab@ipgo.com.br	2
LFS SERVICOS MEDICOS LTDA 03735	RUA LAURO MULLER 116 GRUPO 1202 BOTAFOGO	RIO DE JANEIRO	RJ	2125431355 2125435859	roberta@climcardale.com.br	3
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 00946	ST SMHS QD 301 CONJ A SN ASA SUL	BRASILIA	DF	61-33191536	2002sr@sarah.br	3
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 02378	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 4500 PASSARE	FORTALEZA	CE	85-34994794	xavier@sarah.br	1
CLIN PRO NASCER ASS MED LABORATORIAL 02469	AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BLOCO 1 SALA 129 (BARRALIFE) BARRA DA TIJUCA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-31717859	marly@donascor.com.br	2
RONALDO ALVES DA SILVA ME 00929	RUA JOAO PESSOA 92 A CENTRO	CACERES	MT	65 32231120	climcaceres@terra.com.br	1
SUPARA E TOYODA S C LTDA 00397	RUA GENERAL OSORIO 25 CENTRO	ARACATUBA	SP	18 38236140	lab.cchagas@ia.com.br	2
SULLAB DIST PRODS DIAG HOSP FARMACEU 01013	RUA QUINTINO BOCAIUVA 27 LJ 14 Floresta	PORTO ALEGRE	RS	5133023433	sullab@sullab.com.br	1

Realizado por: Raquel Raigorodski / Renato Leal  
Data: 28/07/2016

BioMérieux Brasil S/A  
Estrada Marquê, n° 491 - Jacarepaguá - □ 22.713-320 - Rio de Janeiro, RJ  
Tel: (21) 2444 1400




Raquel Raigorodski  
Coordenadora de Customer Service  
BioMérieux Brasil

MAPA DE RASTREABILIDADE - VIDAS Estradiol II - REF: 30431 LOTE: 1004490710

Cliente	Endereço	Cidade	UF	Telefone	Email	Quantidades
COC TECNOLOGIA SISTEMAS DIAGNOSTICOS 04566	AV FRANCISCO DE ANSELIS 186 JARDIM ORTIVA	CAMPINAS	SP	19 33033800	ione@cqc.com.br rosangjb@cqc.com.br	1
CLIN DRA DANIELLA S C GIN OBSTETRICI 04401	Rua Guedes, 538 Jardim América	SÃO PAULO	SP	11-3091-8442	acim@castellotti.com.br	2
INST PAULISTA GINECOL E OBSTETRICIA Laboratório IPGO 03927	Rua Abílio Soares, 1125 - Paraíso	SÃO PAULO	SP	11 3057-0222	lab@ipgo.com.br	5
LFS SERVICOS MEDICOS LTDA 03735	RUA LAURO KULLER 116 GRUPO 1202 BOTAFOGO	RIO DE JANEIRO	RJ	2125-531355 2125-596699	roberta@clinicadale.com.br	3
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 00946	ST SMHS QD 301 CONJ A SN ASA SUL	BRASILIA	DF	61-33191536	200297@sarah.br	1
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 02378	AV PNEB JUSCELINO KUBITSCHEK 4509 PASSARE	FORTALEZA	CE	85-34694794	xavier@sarah.br	1
CLIN PRO MASGER ASS MED LABORATORIAL 03489	AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BLOCO 1 SALA 123 (BARRALHE) BARRA DA TIJUCA	RIO DE JANEIRO	RJ	21-31717853	marly@promasger.com.br	2
SUHARA E TOYODA S C LTDA 00337	RUA GENERAL OSORIO 25 CENTRO	ARACATUBA	SP	18 38236140	lab.cchagas@la.com.br	1
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 01420	Av. Luiz Rocha s/n, Monte Castelo	SÃO LUIS	MA	98-3216-5268	9921@sarah.br	1
DIAG PRIME COM E DIST PRO CREN LTDA 00279	R MAESTRO HENRIQUE VOGELER 45 BRAS DE PINA	RIO DE JANEIRO	RJ	2133284950	leandro@diagprime.com.br	1
RONALDO ALVES DA SILVA ME 00929	RUA JOAO PESSOA 92 A CENTRO	CACERES	MT	65 32231120	clinicaceres@jenta.com.br	1
SULLAB DIST PRODS DIAG HOSP FARMACEU 01013	RUA QUINTINO BOCAIUIVA 27 LJ 14 Fluoresa	PORTO ALEGRE	RS	5133022433	sullab@sullab.com.br	1
LABORE ANALISES CLINICAS 01532	RUA DOMINGOS BARBOSA ARAUJO 378 CALIANDIA	BAHIA	BA	75-3623-8844	labotrefsa@yuoi.com.br	1

Rastreado por Raquel Raigorodski / Renato Leal  
Data: 26/07/2016

Biométrieux Brasil S/A

Estrada Mapua, n.º 491 - Jacarepaguá - C 22 713-320 - Rio de Janeiro, RJ

Tel.: (21) 2444.1400




Raquel Raigorodski  
Coordenadora de Customer Service  
Biométrieux Brasil

BIOMÉRIEUX

MAPA DE RASTREABILIDADE - VIDAS Estradiol II - REF: 30431 LOTE: 1004666000

Cliente	Endereço	Cidade	UF	Telefone	Email	Quantidades
PROHOSP DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 03020	RUA JOSE FERREIRA BARROS, 89 VILA FANNY	CURITIBA	PR	41-32463376	<a href="mailto:assessoria@prohosp.com.br">assessoria@prohosp.com.br</a>	2
						2

Realizado por: Raquel Raigorodsch / Renato Leal

Data: 29/07/2016

bioMérieux Brasil S/A

Estrada Mapurá, n.º 491 - Jacarepaguá - □ 22.713-320 - Rio de Janeiro, RJ

Tel.: (21) 2444.1400


Raquel Raigorodsch  
Coordenadora de Customer Service  
bioMérieux Brasil

MAPA DE RASTREABILIDADE - VIDAS ESTRADIOL II - Referência 30431

VIDAS ESTRADIOL II - Referência 30431	Lote 1004666000 Validade: 22/01/2017	%	Lote 1004661480 Validade: 29/01/2017	%
Quantidade de kits Importados	20	100%	15	100%
Quantidade de kits Distribuídos	2	10%	0	0%
Quantidade de clientes que receberam kits	1		0	

Realizado por: Raquel Ralgorodschii  
Data: 26/07/2016



  
Raquel Ralgorodschii  
Coordenadora de Customer Service  
bioMérieux Brasil


bioMérieux Brasil S/A  
Estrada Mapuá, n.º 491 - Jacarepaguá - □ 22.713-320 - Rio de Janeiro, RJ  
Tel.: (21) 2444.1400 - Fax: (21) 2444.1490

MAPA DE RASTREABILIDADE - VIDAS ESTRADIOL II - Referência 30431

VIDAS ESTRADIOL II - Referência 30431	Lote 1004403350 Validade: 19/10/2016	%	Lote 1004343690 Validade: 23/07/2016	%	Lote 1004490710 Validade: 24/11/2016	%
Quantidade de kits Importados	32	100%	20	100%	22	100%
Quantidade de kits Distribuídos	32	100%	20	100%	21	95%
Quantidade de clientes que receberam kits	17		11		13	

Realizado por: Raquel Raigorodski  
Data: 26/07/2016

biMérieux Brasil S/A  
Estrada Mapua, n.º 491 - Jacarepaguá - □ 22.713-320 - Rio de Janeiro, RJ  
Tel.: (21) 2444.1400 - Fax.: (21) 2444.1490

  
Raquel Raigorodski  
Coordenadora de Customer Service  
biMérieux Brasil