

São Paulo, 01 de julho de 2017.

AVISO DE AÇÃO DE CAMPO

Ação Nº: 0001/2017

Produto: APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO FLEXAVISION

Produto: 10369010048

Ref.: AÇÃO DE CAMPO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES – ESTATIVA DE TETO CH-200

DESCRIÇÃO

A Shimadzu Corp. identificou que há possibilidade de ocorrer uma fissura no suporte do tubo de raios-X ao longo do tempo e, caso esta fissura aumente em tamanho, o tubo de raio-X poderá se desprender do suporte e entrar em contato com o operador ou paciente. Apesar desta possibilidade ser muito remota a Shimadzu Corp. decidiu fazer a instalação de um reforço nesta fixação entre o tubo de raios-X e seu suporte para, assim, coibir qualquer possibilidade de incidente.

A **(NOME DO CLIENTE)**

Informamos que no dia ____/____/____ será realizada a ação de campo acima descrita. Solicitamos o envio dessa carta assinada para o endereço de e-mail ast.medica@shimadzu.com.br.

Atenciosamente,

SHIMADZU DO BRASIL
CÉSAR MASSAHIRO HIGUTE
Responsável Técnico

CLIENTE
Nome:
Cargo: