



AVISO URGENTE DE SEGURANÇA

GE Healthcare

Healthcare Digital
500 W. Monroe St.
Chicago, IL 60661 Estados Unidos

Refª interna da GE Healthcare: FMI 14017

26 de abril de 2018

Para: Diretor de Radiologia/Cardiologia
Gerente de Risco/Administrador do Hospital
Diretor de Engenharia de Biomedicina

RE: DPX-NT, DPX Bravo, DPX Duo, DPX-MD, Prodigy, Prodigy Advance Software que executam o software enCORE da versão 9.0 até a versão 10.0 - Os relatórios podem ser enviados para o PACS com o nome do paciente errado via cabeçalho DICOM/PACS.

Certifique-se de que todos os possíveis usuários de sua instalação estão cientes desta notificação de segurança e sobre as ações recomendadas.

Problema de segurança Sob determinadas condições, quando houver uso da Lista de Trabalho DICOM junto com o DICOM MPPS um relatório sobre o exame de densidade óssea pode ser enviado para o PACS com informações incorretas de paciente no cabeçalho DICOM. As informações corretas de paciente serão listadas na imagem do relatório DICOM, entretanto, o relatório pode aparecer sob nome de paciente diferente no PACS.

Não houve nenhuma lesão relatada como resultado deste problema.

Instruções de segurança Você pode continuar usando o seu sistema com a desativação do recurso DICOM MPPS como segue:

1. No enCORE, selecione Ferramentas | Opções de Conectividade.
2. Selecione a aba DICOM.
3. Pressione Configurar Conexões na seção Lista de Trabalho DICOM.
4. Nas definições de SCP do MPPS, limpe os campos Título AE e Endereço TCP/IP.
5. Pressione OK para todos.

Um representante da GE Healthcare lhe contatará para agendar a correção.

Detalhes do produto afetado Todos os DPX-NT, DPX Bravo, DPX Duo, DPX-MD, Prodigy, Prodigy Advance que executam o software enCORE da versão 9.0 até a versão 10.0.

Correção do produto A GE Healthcare corrigirá todos os produtos afetados, sem nenhum custo para você. Um representante da GE Healthcare lhe contatará para agendar a correção.

Informações para contato Se tiver dúvidas sobre este Aviso de Segurança ou sobre a identificação dos itens afetados, favor contactar o seu representante local de Vendas ou de Serviço da GE Healthcare. Favor ligar para um dos números a seguir:

Estados Unidos: 800 437 1171

Brasil: 3004 2525 (Capitais e regiões metropolitanas) / 0800 165 799 (Demais regiões)

Para outros países, entre em contato com o Serviço Técnico da GE Healthcare.

Esteja certo de que a nossa maior prioridade é manter um elevado nível de segurança e qualidade. Se tiver quaisquer dúvidas ou perguntas, por favor contacte-nos imediatamente.

Muito obrigado,



Russell Roberson
Executive - Quality
GE Healthcare



Jeff Hersh, PhD M.D.
Chief Medical Officer
GE Healthcare