

ANEXO 1

Mantenha uma cópia deste anexo com cada manual do operador da Spectra Optia em sua instalação.

As informações abaixo aparecem no manual do operador do Sistema Spectra Optia, Capítulo 4, seção “Configuração de Uso de um Aquecedor de Sangue”

Aba	Parâmetro	Descrição	Opções de configuração
Aquecedor de sangue	Linha de retorno	Indicação de que um aquecedor de sangue estará conectado à linha de retorno. Instruções para conectar o conjunto de tubo do aquecedor de sangue são exibidas na tela antes de você conectar ao paciente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sim • Não Padrão: Não

Figura 1: Instruções de manual de operador de sistema Spectra Optia atual

Aba	Parâmetro	Descrição	Opções de configuração
Aquecedor de sangue	Linha de retorno	Indicação de que um aquecedor de sangue estará conectado à linha de retorno. Você deve preparar o conjunto do tubo do aquecedor de sangue antes de conectar ao paciente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sim • Não Padrão: Não

Figura 2: Instruções atualizadas

As informações abaixo aparecem no manual do operador do Sistema Spectra Optia, Capítulo 6.

Indicação de Uso de um Aquecedor de Sangue

Siga as instruções abaixo para indicar o uso de um aquecedor de sangue durante o procedimento. Para conectar e preparar o tubo do aquecedor de sangue, siga as instruções na tela. Se você estiver usando um aquecedor de sangue, na linha de troca, consulte “Procedimento de Troca: Usando um Aquecedor de Sangue na Linha de troca” na página (o número de página varia).

Figura 3: Instruções de manual do operador Spectra Optia atual

Terumo BCT Tecnologia Médica Ltda.
 Rua do Rócio, 220 – CJ. 41
 Vila Olímpia – São Paulo/SP
 CEP: 04552-000
 Tel: (55 11) 2899-2600
 Fax: (55 11) 2899-2602

Figura 3: Instruções de manual do operador Spectra Optia atual

Indicação de uso de um aquecedor de sangue

Siga as instruções abaixo para indicar o uso de um aquecedor de sangue durante o procedimento. Você deve preparar o conjunto de tubo do aquecedor de sangue antes de conectar ao seu paciente. Se você estiver usando um aquecedor de sangue na linha de troca, consulte "Procedimentos de Troca: Usando um Aquecedor de Sangue na Linha de troca" na página *(o número de página varia)*.

Figura 4: Instruções atualizadas