

Rio Claro, 23 de Novembro de 2018.

Prezado Cliente,

Ref.: AC.2018.004 - Possibilidade de ocorrência de danos na embalagem em virtude de armazenamento e/ou transporte inadequado.

PROBLEMA: Caso os itens sejam armazenados ou transportados na posição vertical, podem ocorrer danos na embalagem interna e conseqüentemente comprometer a esterilização e uso do produto.

PRODUTOS AFETADOS: códigos: 04.30.02.37XXX - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12-14 Primária 09.30.02.37XXX - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12-14, 04.30.05.44XXX - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12-14 Primária, 09.30.05.44XXX - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12-14 Primária 04.30.50.XXXXX - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0mm Cone 12/14 Primária
Fabricados entre: outubro / 2013 e abril / 2018.

RISCOS: Os produtos que apresentarem danos na embalagem **NÃO** devem ser utilizados, conforme especificado na instrução de uso.

ORIENTAÇÕES: Sempre armazenar e transportar os produtos na posição **horizontal**.

Além disso, seguir as recomendações constantes na instrução de uso:

"Quedas ou esmagamento sobre superfícies duras podem causar danos ao produto. Dessa forma faz-se necessário que o usuário realize uma inspeção do produto, quanto a sua integridade, quando da abertura da embalagem e, se for observada alguma anormalidade, o produto não deverá ser utilizado".

"O produto deve ser transportado adequadamente, evitando-se quedas e atritos que possam danificar a estrutura e a superfície da peça."

Dúvidas, por favor, não hesite em contatar-nos, através dos seguintes canais:

CAP – Canal de Atendimento ao Público

Tel.: (19) 2111 – 6500

E-mail: cap@vincula.com.br