

Ação de Campo: **Analizador AQT90 Flex**

Prezado Cliente

A Radiometer recentemente ficou ciente de que a temperatura interna no AQT90 Flex sob as piores condições pode ficar levemente acima das condições aceitáveis para os cartuchos dentro do aparelho.

Para assegurarmos que a temperatura não excederá o limite máximo, a especificação ambiental para a temperatura ambiente do AQT90 Flex foi alterada para 30°C/80,6°F, anteriormente era 32°C/89,6°F.

Risco para o paciente

Não há.

Produto afetado

Todos os AQT90 Flex.

O que o Cliente deve fazer:

Nenhuma ação é necessária se a temperatura ambiente onde o AQT90 Flex se encontra for menos do que 30°C/80,6°F. Se a temperatura do local for acima desse limite, o cliente deve baixar essa temperatura ou mover o aparelho para um outro local com temperatura mais baixa.

OBS:

Se você não for o usuário final do produto afetado, favor fazer com que essa carta seja distribuída até o mesmo.

Em caso de dúvidas favor contatar o Representante da Radiometer

Atenciosamente,
BIODINA Instrumentos Científicos Ltda

Sylvio dos Santos Jr.
Responsável Técnico