


ATUALIZAÇÃO DO APP UTILIZANDO O HUB

Medtronic


Os aplicativos controlados pela Medtronic podem ser atualizados utilizando o app Hub. O Airwatch foi repaginado e agora se chama Hub. Caso tenha outras dúvidas não respondidas pelas informações abaixo, entre em contato pelo telefone 1-800-707-0933, e selecione a opção Samsung Device Support [Suporte ao Dispositivo Samsung].

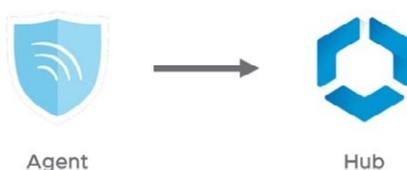

As instruções a seguir o guiarão através da atualização do app Hub, bem como de todas as atualizações de apps disponíveis:

1. Conecte o tablet ao Wi-Fi

- Navegue até  Settings [Configurações]
- Toque em Connections > Wi-Fi > [Conexões > Wi-Fi >] e selecione o SSID desejado
- Verifique se ele indica “Connected” [Conectado]

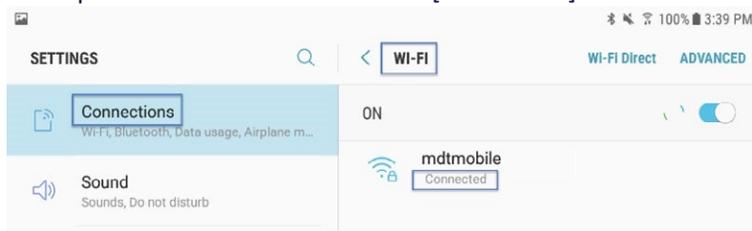


- Pressione o botão Home para retornar à tela inicial

2. Navegue até o app Google Play Store


- Toque no ícone do menu ao lado da barra de pesquisa



- A partir do menu pop-out, selecione “My Apps & Games” [Meus Apps e Jogos]

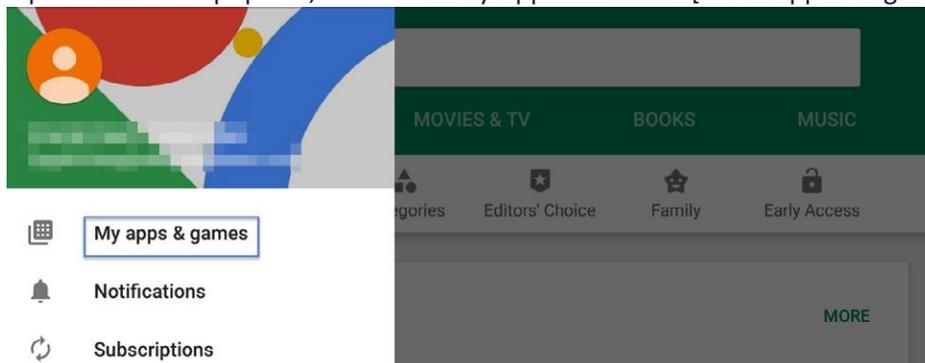


- c. As atualizações disponíveis serão exibidas. Atualize o app “Intelligent Hub”. Essa é a única atualização necessária e outros apps podem ser atualizados depois

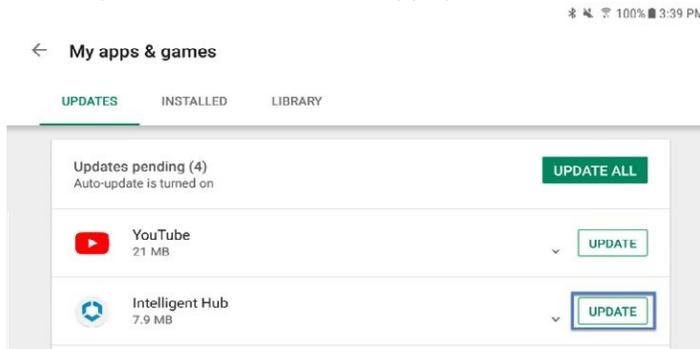

- d. Pressione o botão Home para retornar à tela inicial

3. Navegue até o app Hub

- a. A tela de início será exibida
b. Observe que o ID único do tablet está em um ponto diferente de onde estava no Agent
c. Abra o “App Catalog” [Catálogo do App]

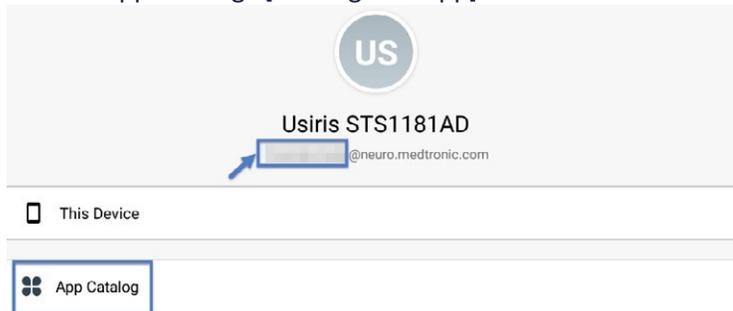


4. Solicite todas as atualizações disponíveis



5. A versão do app pode ser verificada em dois locais:

HUB

- Navegue até o Hub e selecione “This Device” [Este Dispositivo]
- Selecione “Managed Apps” [Apps Gerenciados]
- O número da versão será exibido abaixo do nome do aplicativo

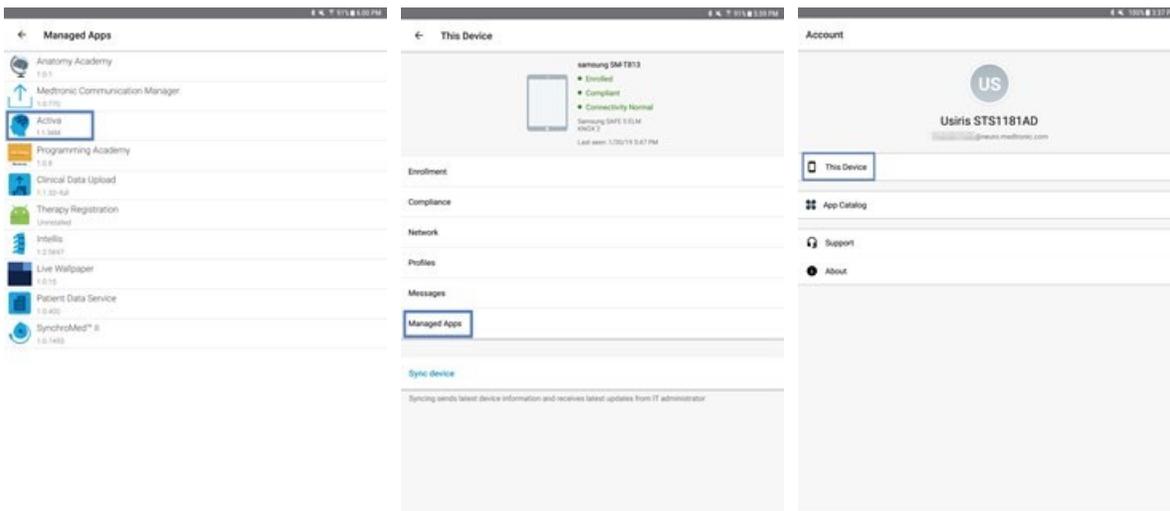

TELA ABOUT [SOBRE]

- Abra o aplicativo da terapia
- Toque no ícone das configurações no canto superior direito e selecione “About” [Sobre]
- O número da versão será exibido na seção “Clinician App” [App do Médico]

