


RECARREGADOR MODELO 37751 INSTRUÇÕES DE RESET

Medtronic

1 O QUE VOCÊ PRECISA

- Uma chave de fenda pequena
- um clipe de papel padrão

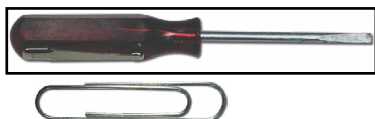

O recarregador deve ser desconectado. Não efetue o reset do recarregador enquanto ele estiver conectado na alimentação AC.

2 REMOVA A TAMPA DE ACESSO

Tampa de acesso

O parafuso



Use a chave de fenda pequena para desparafusar e remover a tampa de acesso.

3 LOCALIZAR O ORIFÍCIO DE RESET

Orifício do botão de reset




Localize o orifício do botão de reset.

4 REALIZE O RESET



Torça o clipe de papel para deixá-lo reto. Insira o clipe de papel no orifício de botão de reset.

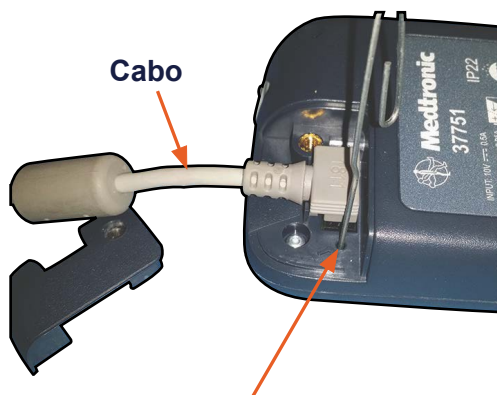

Pressione o botão e mantenha-o pressionado por 2 segundos. Troque a tampa de acesso e aperte o parafuso.

Obs.: Certifique-se de que o cabo esteja fixado com segurança antes de você substituir a tampa de acesso.


5 LIMPE A TELA



Botão verde

O recarregador exibe a AC. Recarregue a tela. Pressione o botão verde para limpar a tela.

6 CONFIRME O RESET COMPLETO

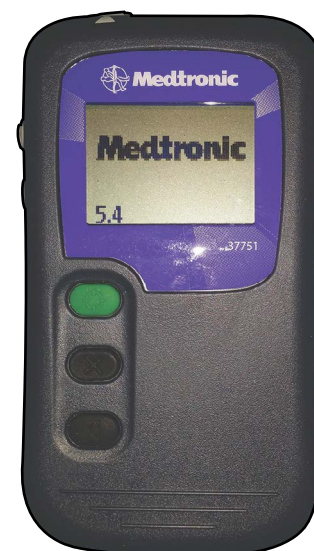

Pressione o botão verde novamente para iniciar uma sessão de carregamento. Se o recarregador não funcionar, ligue para o Atendimento ao Paciente Medtronic em 1-800-510-6753.