

**DRAFT**

Cartão VMC preliminar para Carga da Bateria  
01  
24 de abril de 2019

# Medtronic



## SISTEMA DE CRIAÇÃO DE IMAGEM O-ARM™ 1000 ETAPAS PARA INSPECIONAR A CARGA DA BATERIA


Para assegurar carga de bateria suficiente para completar um procedimento cirúrgico, inspecione a carga das baterias diariamente antes de iniciar qualquer caso ou após carregamento extenso das baterias.

1. Assegure a carga total das baterias do IAS conectando a MVS na tomada de energia e então conectando-a ao IAS através do cabo de interconexão. Deixe o sistema conectado por 6 horas.

A carga total só é necessária uma vez ao dia para apoiar o uso clínico diário.

2. Ligue o sistema, desconecte o cabo de interconexão e aguarde dois minutos.

3. Verifique se pelo menos 9 barras nos indicadores "Battery Levels" para **M** e **X** estão iluminadas.

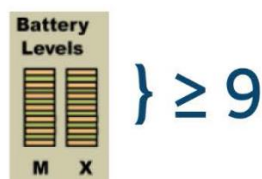

4. Se o nível da bateria indicar menos de 9 barras, não prossiga com a seção de aquisição de imagem e contate o serviço técnico da Medtronic:

EUA: (800) 595-9709; ou 720-890-3160

No resto do mundo: +1-720-890-3160

RS.NAVTECHSUPPORT@MEDTRONIC.COM

**SISTEMA DE CRIAÇÃO DE IMAGEM O-ARM™ 1000  
ETAPAS PARA INSPECIONAR A CARGA DA BATERIA**