

---

## AÇÃO CORRETIVA NO MERCADO

Número do AC: 2019/02

**Produto: ID-DiaCell POOL (1x10ml)**

**REF: 003630V**

**Lote: 06070.36.1**

Prezado(a) Senhor(a),

Esta carta contém informações importantes que requerem sua atenção imediata e urgente.

A Bio-Rad está conduzindo voluntariamente como medida de precaução, esta Ação Corretiva no Mercado, referente ao produto acima indicado.

Foi verificado pelo Controle de Qualidade da Bio-Rad que a hemácia-teste “ID-DiaCell POOL”, lote 06070.36.1, vencimento 17/06/2019, está apresentando uma queda na reatividade do antígeno Fy<sup>b</sup>.

Como V. Sa. utiliza o produto “ID-DiaCell POOL” do referido lote, estamos providenciando a substituição imediata do kit .

### **Análise de Risco:**

Considerando a finalidade de uso do produto ID-DiaCell POOL, análise de risco referente ao problema foi realizada. A diminuição da reatividade para o antígeno Fy<sup>b</sup> pode levar a resultados fracos ou negativos em amostras que apresentam anticorpos **anti-Fy<sup>b</sup> fracos**.

Entretanto, este risco é mitigado considerando que o ID-DiaCell POOL é composto por duas hemácias e a diminuição da reatividade para o antígeno Fy<sup>b</sup> foi detectada em apenas uma das hemácias componentes do produto. Além disso, considera-se que a finalidade de uso do produto ID-DiaCell POOL é para pesquisa de anticorpos em doadores de sangue.

### **Orientações para a Ação Corretiva no Mercado:**

Solicitamos que sigam as instruções indicadas abaixo:

- a. Interromper imediatamente o uso do ID-DiaCell POOL, lote 06070.36.1.
- b. Descartar o ID-DiaCell POOL, lote 06070.36.1.
- c. V.Sa. está recebendo um novo “ID-DiaCell POOL” de um lote distinto para uso nos testes de pesquisa de anticorpos irregulares.
- d. Gentileza preencher o formulário "Ciência de Ação Corretiva no Mercado" em anexo e nos devolver por e-mail (qms\_doc@bio-rad.com) ou por fax [(31) 3689-6611 A/C Jean Ferreira]. Necessitamos nos assegurar de que V.Sa. recebeu e implementou as ações indicadas neste comunicado.

---

Nossa equipe encontra-se à disposição para orientá-lo no caso de dúvidas na utilização do produto/lote acima mencionado, através do nosso Suporte Técnico ao Cliente-CTS pelos telefones 4003 0399 (Capital e regiões metropolitanas) ou 0800 880 0092 (outras localidades) ou pelo e-mail suportecientifico@bio-rad.com.

Desculpamo-nos pelos transtornos porventura causados e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Cordialmente,



**Gerência de Manufatura**  
**Responsável Técnico**



**Gerência de Produto**

**DiaMed Latino América S.A.**  
**Lagoa Santa, 27 de Maio de 2019.**