

Mensagem de Alerta

Risco de quebra de ponteira dos produtos SonicBorden e SonicFlex

A quebra da ponteira dos produtos abaixo detalhados pode ocorrer em casos onde todos os cuidados necessários com o produto, constantes no manual de uso, não sejam seguidos. A ponta quebrada pode vir a ser engolida, colocando em risco o trato gastrointestinal do paciente.

Com o intuito de garantir a segurança dos pacientes, reforçamos a necessidade de que algumas práticas sejam seguidas:

- Avaliação da ponteira deve ocorrer a cada uso, conforme gabarito de verificação enviado com o produto, caso haja marcas de desgaste em qualquer posição da ponteira, esta deve ser descartada e substituída;
- A montagem da ponteira deve ser efetuada apenas com a ferramenta de montagem fornecida junto com o produto, de maneira que a ferramenta esteja em completo contato com a base da ponteira, evitando contato inclinado;
- Deve-se respeitar o tempo de uso previsto no manual de uso do mesmo.

Dados do produto:

- Registro ANVISA: 10064010050
- Nome e Modelo do Produto: 0.9804304 – Ponta Universal No.5
- Lote em que ocorreu a falha: 11/19

Atenciosamente,



Ludgi Paolo Pedrazza
Responsável Técnico
CREA-SC 1250158