

Resolução de Problemas de Distribuição de Slides

Códigos de Condição de Dispensa de Slides


Os códigos de condição mais comuns a ocorrer se a ABP (placa anti-backup) não puder avançar dentro do cartucho são apresentados na tabela abaixo:

Códigos de Condição de Dispensa de Slides para Sistemas VITROS	
Sistemas VITROS 250/350	
EAU	* MEDIÇÃO DE AMOSTRAS * DETECTOR DE UMIDADE * Nenhum slide presente.
7EH	ÊMBOLOS * Mau funcionamento do sensor do êmbolo externo
D03	* TRANSPORTE DE SLIDE * LÂMINA DE DISPENSA * Erro de posição *
D04	* LÂMINA DE DISPENSA * Erro do sensor *
Sistemas VITROS 5,1 FS/4600/5600/XT 7600	
PVD-017	Embalagem de reagente ou diluente inutilizável
TA0-84G ou TA1-84G	LÂMINA DE DISPENSA - Página Inicial do Localizador de Arestas - Nenhum Slide Detectado
TA0-6** ou TA1-6**	FORNECER 1 ÊMBOLO
TA0-2** ou TA1-2**	FORNECER 2 ÊMBOLOS

Reposicionamento da Placa Anti-Backup (ABP)

Se você tiver um dos códigos de condição acima, siga estas etapas:

1. Remova o cartucho afetado do Suprimento de Slides. É possível observar o seguinte:
 - Nenhum slide é visível na janela de distribuição de slides na parte superior do cartucho.
 - A pilha de slides ou a ABP parece estar torta.
 - Slides ou a ABP são restritos dentro do cartucho.
2. Reposição da ABP:
 - a. Segure o cartucho na posição vertical.
 - b. Empurre cuidadosamente a ABP localizada dentro da parte inferior do cartucho. (Consulte a ilustração abaixo para obter a localização da ABP.)

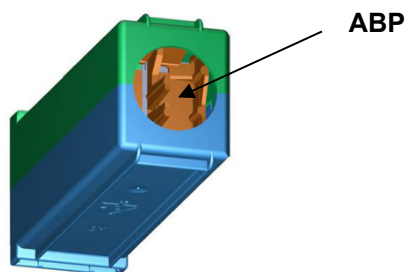

- c. Continue empurrando suavemente até que a parte superior da pilha de slides fique visível na janela de distribuição de slides na parte superior do cartucho. É possível ouvir um leve clique, indicando que a ABP está engatando nos dentes de plástico dentro do cartucho.
3. Recarregue o cartucho no sistema.
 - Se um código de condição de dispensa de slides ocorrer novamente no mesmo cartucho, remova-o e substitua por um novo.
 - Registre os cartuchos descartados no formulário Solicitação de crédito, conforme necessário, e devolva o formulário à Ortho para receber crédito pelos cartuchos afetados.