

CONFIGURAÇÃO DO CT900 PROGRAMADOR CLINICO

Medtronic


710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA
Tel: (763) 514-4000

medtronic.com

Este documento fornece dicas para configurar o programador clínico e atualizar os aplicativos


BOTÕES E PORTAS

Revise o diagrama à direita para se familiarizar com os botões e portas principais.

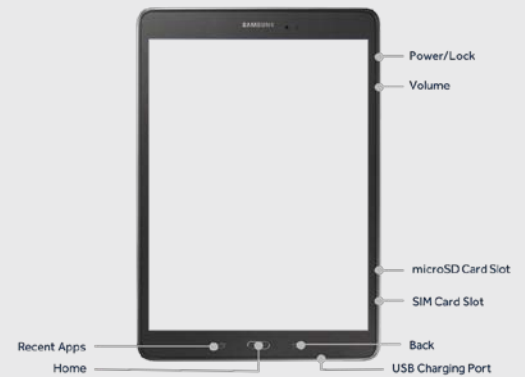


PASSO 1: LIGUE O TABLET

- Pressione e segure o botão **POWER** até ver o logotipo da Samsung.
- Digite o código de Acesso padrão: **mdt2222**

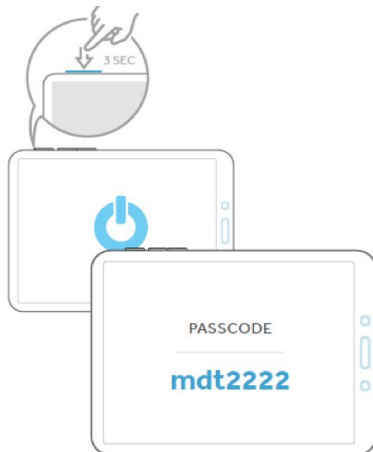

PASSO 2: AJUSTE O IDIOMA LOCAL


Presione o ícone **CONFIGURAÇÃO**.

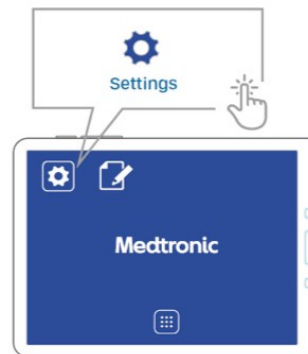

Toque no ícone **IDIOMA E ENTRADA** na barra de menu à esquerda.

Toque na opção **IDIOMA** na tela principal.

- Role para encontrar x seu idioma local.
- Toque para escolher seu idioma preferido.

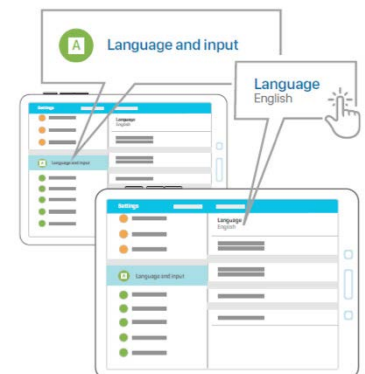

Medtronic

Further Together

PASSO 3: CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO WIFI

NOTAS:

- A conexão Wi-Fi é necessária para a instalação/atualização do aplicativo.
- Wi-Fi não é necessário para a programação da terapia.




- Ligue o Wi-Fi deslizando a **BARRA WI-FI** para a direita.
- Toque o nome da rede Wi-Fi que você deseja ingressar.
- Digite a senha apropriada para ingressar na rede Wi-Fi escolhida.
- Toque **CONECTAR** para ingressar na rede Wi-Fi.
- Assegure que o Tablet está conectada a rede Wi-Fi e tem oportunidade de sincronizar.

PASSO 4: REGISTRO DE MEDTRONIC

Complete o proceso de registro de Medtronic seguindo os seguintes passos:

Presione o ícone da aplicação de **TERAPIA DE REGISTRO**.

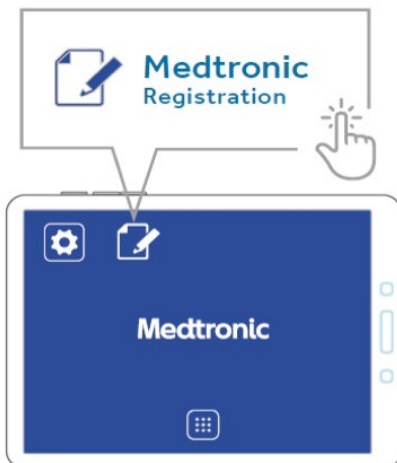

PASSO 5: REGISTRO DA LA APPLIÇÃO

- Leia o contrato de licença do usuario final, marque a Caixa e clique em **PRÓXIMA**.
- Selecione o país e pressione **REGISTRAR**.

NOTA: É importante que o Tablet seja registrado no país em que será usado como um registro de país que controla o Acesso ao software aprobado. Entre com contato com o serviço de assistência à mobilidade se tiver alguna dúvida sobre o registro do país.


- Selecione a terapia e presione **REGISTRAR**.
- Assegure de receber o aviso de registro completo na tela.



PASSO 6: SELECCIONE E VISUALIZE EM PDF

Uma vez complete o registro, você será solicitado a abrir o contrato de licença do usuário final.

NOTA: Seleccione **ADOBE ACROBAT** e confirme que está configurado com a opção padrão para abrir arquivos PDF.

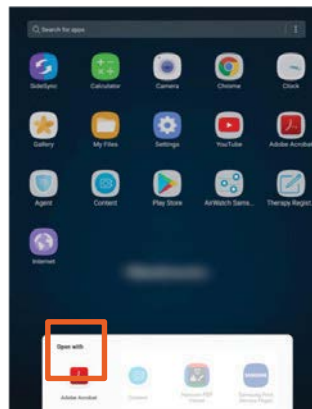

EQUIPO DE ASISTENCIA DE MOBILIDAD

1-800-707-0933, seleccione a opção para o dispositivo Samsung.

- Maneje preguntas relacionadas con IT no relacionadas con l terapia de los representantes de Medtronic. **Brinda servicio de asistencia 24/7**, con soporte en vivo de **7 a.m. a 7 p.m.**