

Notificação Importante de Qualidade de Produto
Aviso de correção

Descrição do Produto	Número de Catálogo	Número de Lote (Data de Exp 2020-11-30)
Nível 1	146	23691
Nível 2	147	23692
Nível 3	148	23693

Este aviso é destinado aos usuários finais destes produtos.
Se você não for o usuário final, encaminhe este Aviso ao pessoal de laboratório apropriado.

Data 06 de Fevereiro de 2020

Para Diretor, Gerente e Supervisor Técnico do laboratório.

De Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda

Produtos **Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT**

Problema Observamos que o analito Troponina T pode não atender à reivindicação de período limite para utilização após descongelamento e abertura do frasco conforme impresso nas instruções de uso. Em relação à Troponina T para os lotes acima especificados, deve-se considerar dois dias ao invés de quatro dias, conforme indicado abaixo pelo texto em negrito e destacado:

Reivindicações Revisadas

Mudanças significativas estão destacadas!

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Descongelado aberto: Uma vez descongelado, aberto, e armazenado com tampa bem apertada de 2 a 8°C, **Troponina T** permanecerá estável por **2 dias**.

**Instruções de uso
revisadas específicas
para cada lote**

As instruções de uso que agora incluem a reivindicação período limite para utilização atualizado para o analito Troponina T na seção ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE estão disponíveis na Internet em <http://myeinserts.qcnet.com>.

Ações Requeridas

- Por favor, obtenha uma cópia das instruções de uso dos produtos Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT em: <http://myeinserts.qcnet.com>. Descarte todas as versões anteriores das instruções de uso destes lotes de produtos que você possa ter impresso e as substitua pelas instruções de uso atualizadas.
- Contate o suporte científico da Bio-Rad através do 0800 880 0092 se você tiver dúvidas sobre este aviso. Formas alternativas de se obter as instruções de uso estão disponíveis e podem ser solicitadas através do nosso suporte científico.

Agradecemos sua paciência e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que este aviso possa ter causado.