

**A todos os clientes e usuários do Fabius com
saída externa conjunta de gás fresco (ACGO)**



**Adesivo adicional para aparelhos – Saída externa de gás fresco / saída externa
conjunta de gás fresco**

Prezados Usuários

Gostaríamos de fazer referência ao Aviso de Segurança emitido pela Dräger em outubro de 2017, cujo tema central era a utilização da saída externa de gás fresco/saída externa conjunta de gás fresco em aparelhos de anestesia, em alguns casos, não conforme com as instruções de utilização. Em virtude disto, a Dräger ilustrou o princípio de funcionamento de sistemas de re-inalação e enfatizou novamente as orientações para uma utilização segura da saída externa de gás fresco/saída externa conjunta de gás fresco em aparelhos de anestesia Fabius, conforme consta nas instruções de utilização.

A Dräger elaborou um adesivo específico para o aparelho que será como lembrete adicional, de modo que o usuário pudesse verificar o ajuste da linha de gás fresco ao iniciar a ventilação mecânica ou ManSpont (ou seja, também ao utilizar o sistema de re-inalação COSY).

Este novo adesivo, assim como também um complemento às instruções de utilização, são enviados em anexo a este comunicado. O adesivo é composto por um elemento gráfico e por um elemento textual e deve ser afixado ao painel de comando do ventilador, nomeadamente ao lado das teclas de ajuste para os modos de ventilação. Há um adesivo para cada modelo de saída externa de gás fresco.

<i>Modelo</i>	<i>Saída externa de gás fresco</i>	<i>Saída externa de gás fresco com interruptor adicional</i>
<i>Descrição contida nas instruções de utilização</i>	Ao utilizar um modo de ventilação automático (Controle de volume, Controle de pressão, Suporte de pressão, SIMV/PS) ou o modo de ventilação Man/Spont,conectar a mangueira curta de gás fresco à saída externa de gás fresco.	...colocar o interruptor situado na saída externa de gás fresco na posição COSY.
<i>Adesivo</i>		

Atenciosamente,

Escolham o adesivo mais adequado ao seu aparelho, assim como também o idioma correto, e afixe-os no painel de comando do ventilador conforme as instruções contidas na folha do adesivo. Se tiverem qualquer dúvida, contatem, o seu representante local autorizado da Dräger.

Atenciosamente,

Anexo

- Adesivo para os dois modelos de saída externa de gás fresco
- Complemento às instruções de utilização