



NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE

A KCI, ficou ciente de incidentes que, em caso muito infrequentes, a Unidade de Terapia ACTIV.A.C.™ pode desligar sem notificação ao usuário (ou seja, sem alarme ou aviso), resultando em uma interrupção da terapia de feridas por pressão negativa. Em raras ocasiões, o desligamento acidental pode resultar em ferimentos, incluindo maceração reversível, infecção localizada ou deterioração da ferida.

Monitore cuidadosamente a Unidade de Terapia ACTIV.A.C.™ e o curativo para garantir que a unidade permaneça LIGADA e administrando a terapia. Ao administrar a terapia, a Unidade de Terapia ACTIV.A.C.™ emite um ruído audível intermitente, e o curativo será retraído e parecerá enrugado.

Consulte a documentação que acompanha a Unidade de Terapia ACTIV.A.C.™ para obter instruções adicionais sobre como ligar a unidade e iniciar a terapia.

Se um incidente dessa natureza ocorrer, entre em contato com seu médico ou entre em contato com a KCI pelo telefone 0800-942-3170.