

São Paulo, Dezembro de 2020.

## AVISO DE AÇÃO DE CAMPO

**Ação Nº:** 0002/2020

**Produto:** ANGIÓGRAFO HEARTSPEED 10 C / DIGITEX 2400CX / BRANSIST ALEXA / BRANSIST SAFIRE

**Registro:** 10369010057 / 10369010034 / 10369010063 / 10369010049

Ref.: **AÇÃO DE CAMPO PARA CORREÇÃO DE FALHA NO EQUIPAMENTO**

### DESCRIÇÃO

A Shimadzu Corp. observou que há a possibilidade de que o evento a seguir ocorra neste dispositivo:

- (1) Em casos raros, quando uma determinada operação é realizada através do joystick do arco C e este está numa posição específica, o arco C poderá iniciar uma movimentação sem o comando do operador devido a um problema no software.
- (2) Para impedir que isso ocorra é necessário a atualização do software do equipamento.
- (3) Enquanto não for feita a atualização, o fabricante recomenda que esta posição específica seja evitada. Em casos de necessidade do uso desta posição, o fabricante recomenda que o operador utilize a função de memória direta com prioridade na operação do braço C sem a utilização da alavanca de operação. Caso o braço C opere de forma não intencional, o fabricante recomenda apertar o botão "Stop Switch".

A **(NOME DO CLIENTE)**

Informamos que no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ será realizada a ação de campo acima descrita.

Solicitamos v. "de acordo" através do envio dessa carta assinada nos campos abaixo para o endereço de e-mail **ast.medica@shimadzu.com.br**.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**SHIMADZU DO BRASIL**  
CÉSAR MASSAHIRO HIGUTE  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
**CLIENTE**  
Nome:  
Cargo