

Dezembro de 2020

Prezado(a) Paciente,

Gostaríamos de informá-lo(a) sobre possíveis comportamentos que podem ocorrer com alguns sistemas de Desfibrilador Cardioversor Implantável Subcutâneo (S-ICD) EMBLEM™ da Boston Scientific. Um sistema de S-ICD inclui o dispositivo de S-ICD (implantado no lado esquerdo do tórax) e o eletrodo (implantado sob a pele do peito). Contatamos o seu cardiologista e passamos detalhes sobre estes comportamentos do dispositivo; cópias das cartas descrevendo estes comportamentos também estão disponíveis em www.BostonScientific.com/advisory. O seu médico será capaz de explicar a você como o seu sistema pode ser afetado e pode trabalhar com você para criar o melhor plano com base nas suas necessidades individuais de saúde.

Para confirmar se o seu S-ICD ou eletrodo faz parte desses grupos afetados, visite este website: www.BostonScientific.com/lookup. Você precisará inserir o seu idioma, bem como os números do modelo e de série do seu dispositivo e eletrodo, que pode ser encontrado no seu cartão de identificação do paciente.

O que você deve fazer?

- Mantenha e compareça em todos seus compromissos médicos e de verificação do dispositivo agendados.
- Converse com o seu médico sobre as melhores etapas para gerenciar o seu sistema de S-ICD.
- Peça ao seu médico ou enfermeira/técnico para ligar o beeper do seu dispositivo na clínica para que você saiba como ele soa.
- Ligue para o seu médico imediatamente se o seu dispositivo:
 - fizer sons de bipe, o que significa que seu dispositivo deve ser verificado o mais brevemente possível;
 - aplica um choque.

Na Boston Scientific, a segurança do paciente é nossa prioridade e nosso foco constante. Estamos comprometidos em trabalhar estreitamente com você e seu médico para resolver esses possíveis comportamentos do dispositivo. Recomendamos que você discuta esta carta com o seu médico, que sabe melhor como estas novas informações podem lhe afetar.



Alexandra Naughton
Vice-Presidente, Garantia da Qualidade



Kenneth Stein, MD, FACC, FHRS
Vice-Presidente Sênior e Diretor Médico, RM