


## Sistemas Artis

Certifique-se de observar as seguintes informações ao operar o seu sistema.

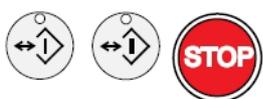

### *Correção para: Limpeza e desinfecção*



#### **Aviso**

Limpeza inadequada do sistema; por exemplo, deixar fluidos entrarem no sistema ou utilizar agentes de limpeza abrasivos.


#### **Interferências elétricas, corrosão ou danos à superfície e, correspondentemente, mau funcionamento ou falha do sistema**

- ◆ Para a limpeza e desinfecção, use somente as substâncias recomendadas.
- ◆ Não deixe que líquidos de limpeza caiam nas aberturas do sistema, por exemplo, aberturas de ar, aberturas entre coberturas.
- ◆ Tenha atenção às instruções de limpeza e desinfecção.

#### *Informações de segurança –*

#### *Limpeza de unidades que têm uma correia visível*

Preste atenção principalmente ao limpar unidades (suportes) que estejam equipados com uma correia visível.

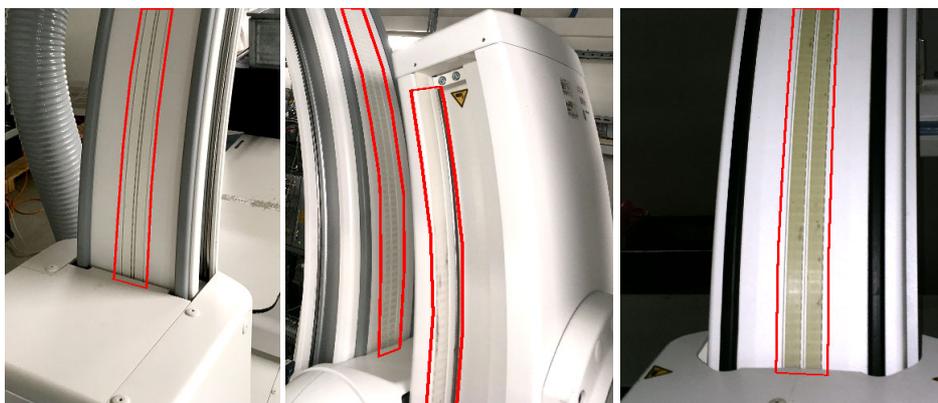

Exemplos de correias

Observe as seguintes informações para limpeza:

- Não use agentes de limpeza que contenham *aldeídos*.
- Não use *latas de spray*.
- Faça limpeza *a seco*, se possível.
- Use *pouco* agente de limpeza ou apenas água, se possível.
- ◆ *Limpe a seco*.