



Lançamento do software - versões M9.10, M11.00, M6.00, M5.10 e M4.10 Atualização de software EasyBloodGas e EasyStat

Medica Corporation está lançando versões de atualização de software

EasyBloodGas
M 9.10
M 11.00

EasyStat
M6.00
M5.10
M4.10

Essa atualização é:

Requerido

Opcional

NOTA:
Versões de software não são suportadas. Se você não conseguir localizar a versão de software apropriada para usar para a atualização, entre em contato com o Suporte Técnico Kovalent.

Atualização de software

A atualização do software do sistema EasyBloodGas e EasyStat inclui:

- A configuração do relógio mestre foi atualizada para estender a configuração do ano após 2020.
- O software EasyStat foi atualizado para corrigir um campo nas configurações que causaram o erro de software para sinalizar resultados de cloreto (Cl-) com base em faixas de resultados de cálcio (Ca ++) armazenadas anteriormente.

Instruções de atualização de versão de software Substituição do Flash Prom e download eletrônico e atualização

Substituição Flash Prom

Siga as instruções fornecidas na folha de inserção do kit de substituição do Flash Prom.

Download eletrônico e atualização

Se você recebeu informações sobre atualizar o software do analisador eletronicamente, siga todas as instruções fornecidas pela Kovalent.

Compatibilidade de Software

A tabela a seguir lista a nova versão do software e sua compatibilidade com versões mais antigas do software. Consulte qualquer documentação adicional fornecida pela Kovalent para determinar a versão correta do software necessária para a atualização do software.

EasyBloodGas	Software antigo	Software novo
LIS (ASTM), Regras RiliBak QC e novo design de impressora	M10.00	M11.00
Impressora mais antiga e novo design de exibição	M7.00 M7.11 M8.00 M9.00	M9.10

** Analisadores EasyBloodGas com versões de software inferiores a M7.00 NÃO requerem esta atualização

EasyStat Analyzers

LIS (ASTM), Regras RiliBak QC e novo design de impressora	M5.00 M5.01	M6.10
Opção comutável de cloreto / cálcio	M3.01 M3.02 M4.00 M5.01	M5.10
Opção somente de cálcio	M2.00 M2.10 M2.11 M2.12 M2.13 M2.14 M3.00 M4.00	M4.10

Se a versão do software do analisador não estiver listada na tabela acima, entre em contato com o Suporte Técnico Kovalent.



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands



Formulário de Instalação de Software do Cliente Atualização de software EasyBloodGas e EasyState

Medica Corporation está lançando versões de atualização de software

Conclua o processo de instalação do software e nos devolva este formulário assim que a instalação estiver completa.

EasyBloodGas
M 9.10
M 11.00

EasyStat
M6.00
M5.10
M4.10

Informações gerais

Nome do cliente	<input type="text"/>
Cidade/Estado/País	<input type="text"/>
Nome do distribuidor	Kovalent do Brasil Ltda
Nome do instalador	<input type="text"/>
Telefone/Email	<input type="text"/>

Essa atualização é:

Requerido

Opcional

NOTA:
Versões de software não são suportadas. Se você não conseguir localizar a versão de software apropriada para usar para a atualização, entre em contato com o Suporte Técnico Kovalent.

Informações do Analisador

Analisador: EasyBloodGas EasyStat Analisador N/S

Software Atual

Versão Software Checksum

Novo Software

Software REF No. Novo Software versão
Checksum CRC #

Informação de reconhecimento

- O software foi instalado com sucesso no sistema identificado acima. Sim
- A memória foi limpa e as OPÇÕES DO USUÁRIO do cliente foram inseridas Sim
- A data do *MASTER CLOCK* foi confirmada e ajustada, se necessário Sim
- A calibração foi realizada e aprovada (anexar impressão) Sim
- O CQ foi executado e aprovado (anexar impressão) Sim
- Se não for bem-sucedido, descreva o (s) motivo (s): Não

Assinatura:

Data:

Nome e cargo impresso:

Informação de retorno:

Por favor, devolva este formulário, calibração e impressões de QC para:
e-mail – sat@kovalent.com.br



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands

Kovalent do Brasil Ltda
Assistência Técnica – SAT
Rua Cristovão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro – São Gonçalo – RJ
CEP: 24722-414 Telefone: (21) 2623-1367