

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE PRODUTO

Nome do Produto	Registro ANVISA/MS nº	Catálogo (Ref.)	Lotes
STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO	80689090148	Ver Apêndice 1	Ver Apêndice 1

Prezado Distribuidor,

A Becton Dickinson and Company (“BD”) recentemente identificou que todas as unidades dos catálogos e lotes dos STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO™ descritos no Apêndice 1, apresentam uma situação relacionada à extremidade proximal do stent, na qual não se expande imediatamente após a implantação, permanecendo conectada à almofada do stent no sistema de entrega, conforme mostrado na Figura 1.



Figura 1: A extremidade proximal do stent permanece conectada ao material da almofada do stent.

Caso a extremidade proximal do stent não se expanda imediatamente após a implantação, a manipulação excessiva ou forçada do sistema de distribuição de cateteres, bem como o uso de outros dispositivos ou técnicas intravasculares para auxiliar a expansão do stent, podem potencialmente causar danos de grau variado, ocasionando desde o prolongamento do procedimento, dano ou deformidade do stent, lesão vascular potencial e/ou interrupção hemodinâmica que afeta o fluxo sanguíneo e/ou um evento trombótico. Nos casos em que o stent se auto-expandiu, não há risco incremental de dano.

Esta questão foi inicialmente observada na oferta de produtos de 14mm de diâmetro. Também foram relatadas reclamações em outros tamanhos de produtos ofertados. Até o momento, a BD recebeu aproximadamente 250 reclamações relatadas em vários tamanhos de

produtos ofertados. A análise da causa raiz está avaliando a relação da almofada do stent e sua adesão ao stent como potencial fator contribuinte. Além disso, estudos investigativos de amostras de teste de sujeitos observaram traços de material de almofada (grau médico e silicone biocompatível) firmemente aderidos à superfície do stent apenas onde a almofada de stent entra em contato com o stent. A probabilidade dessa ocorrência ainda está sendo investigada.

De acordo com nossos registros de rastreabilidade, identificamos que V. Sra. adquiriu pelo menos uma unidade do(s) produto(s) referenciado(s) nesta carta. **Portanto, as seguintes providências devem ser tomadas:**

1. Imediatamente, verifique se ainda possui em seu estoque o(s) catálogo(s) e lote(s) informados. Caso possua, **descontinue a venda e segregue** os mesmos para que a BD possa realizar a coleta;
2. Compartilhe essa notificação com outros usuários da sua instituição para assegurar que todos estejam cientes;
3. Preencha o formulário de resposta presente nesta notificação (anexo 1) e envie-o ao e-mail BRCR@bd.com a fim de que a BD tome conhecimento de que houve o recebimento desta notificação e possa proceder com o recolhimento dos produtos afetados e geração de nota de crédito, caso ainda possua unidades dos catálogos/lotos informados;
4. Juntamente com o formulário, informe a Lista de Distribuição, contendo os dados de todos os clientes que compraram os catálogos mencionados nesta notificação, por meio do e-mail BRCR@bd.com no formato descrito abaixo em até **05 (cinco) dias** corridos a contar da data de recebimento deste comunicado;
 - a. Caso sua própria instituição opte por realizar diretamente a comunicação, intermediação e execução desta situação com seus clientes, solicitamos que indique essa preferência no formulário do Anexo 1, utilizando o anexo A presente ao final desta comunicação.

Razão Social do Cliente	Endereço Detalhado (Rua, Nº, Prédio/Bloco/Sala, CEP, Cidade e Estado)	Telefone e Fax (DDD)	Nome da Pessoa de Contato	Setor da Pessoa de Contato	E-mail da pessoa de contato	Código do Produto (Ref.)	Lote	Quantidade vendida
-------------------------	---	----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	------	--------------------

Adicionalmente, informamos que comunicaremos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, reafirmando nosso compromisso com a qualidade e segurança dos nossos produtos e respeito aos nossos clientes.

Caso necessite de qualquer assistência adicional, com relação a esta situação, por favor, entre em contato através do e-mail BRCR@bd.com ou pelo telefone (11) 5185-9987/9990.

A BD está comprometida em impulsionar o mundo da saúde. Nossos principais objetivos são a segurança dos usuários e pacientes e o fornecimento de produtos de qualidade aos nossos clientes.




Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
bd.com.br

Lamentamos qualquer inconveniente que esta situação possa ter causado e agradecemos a sua atenção desde já neste assunto.

Atenciosamente,



**Unidade de Tecnovigilância
Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas LTDA**

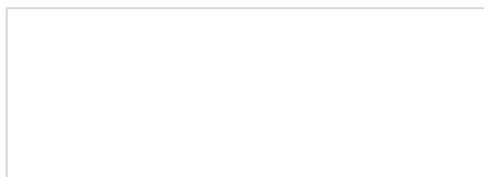

Anexo 1

FORMULÁRIO DE RESPOSTA DO CLIENTE SOBRE PRODUTO

Completar as duas páginas do Formulário e enviar para o e-mail BRCR@bd.com

Nome do Produto	Registro ANVISA/MS nº	Catálogo (Ref.)	Lotes
STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO	80689090148	Ver Apêndice 1	Ver Apêndice 1

1) Do conhecimento deste formulário

- Eu li e compreendi o conteúdo presente nesta notificação.
- Eu compartilhei esta carta com as pessoas da minha organização que têm relação com este tema.
- Enviarei a lista de clientes que compraram os catálogos e lotes informados, de acordo com a solicitação da BD em até 5 dias corridos a contar da data de recebimento deste comunicado.

2) Da notificação

Minha organização irá contatar, intermediar e executar as ações necessárias de ressarcimento e recolhimento junto aos nossos clientes com relação a esta situação. Comprometo-me em realizar a notificação aos nossos clientes dentro de 5 dias corridos e utilizarei a carta do Anexo 2 como referência para fazer a comunicação.

OU

Minha organização prefere que a BD entre em contato com nossos clientes através dos contatos que serão enviados por nós na Lista de Distribuição.

3) Dados do responsável pelo preenchimento deste formulário

Nome:	
Cargo:	Departamento:
Telefone: ()	Email:
Assinatura:	Data:

4) Informações sobre possível recolhimento

Não possuímos, em nosso estoque, mais nenhuma unidade do(s) catálogo(s) e lote(s) informados nesta notificação. Não é necessário preencher o item 4.1.

Possuímos unidades em estoque do(s) catálogo(s) e lote(s) informados nesta notificação conforme informado abaixo e confirmo que as mesmas já estão segregadas para que sejam recolhidas:

Descrição do Produto	Catálogo (Ref.)	Lote nº	Quantidade em Estoque (unidades)

4.1) Dados do local de recolhimento dos produtos afetados

Razão Social da Instituição	
CNPJ:	Inscrição Estadual:
Endereço:	
Nº:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
Estado (UF):	CEP:

Apêndice 1: Lista de produtos impactados

Catálogo (Ref.)	Nome do Produto	Registro ANVISA/MS nº	Lotes
VENEM10040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm	80689090148	Todos os lotes dentro do prazo de validade
VENEM10060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		

**BD****BAIRD***has joined BD*

Rua Alexandre Dumas, 1976

São Paulo, SP 04717-004

bd.com.br

Catálogo (Ref.)	Nome do Produto	Registro ANVISA/MS nº	Lotes
VENEM16040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm	80689090148	Todos os lotes dentro do prazo de validade
VENEM16060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		



Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
bd.com.br

ANEXO 2

Carta a ser encaminhada ao cliente final



**URGENTE: AVISO DE RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE
PRODUTO – PI-21-4000**

STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO™

Tipo de ação de campo: Recolhimento de Produto

Esta carta contém informações importantes que requerem sua atenção **imediate**.

Prezado Cliente,

A Becton Dickinson and Company (“BD”) está conduzindo uma ação de campo para remover todos os lotes distribuídos do **STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO™**

Nome do Produto	Registro ANVISA/MS nº	Catálogo (Ref.)	Lotes
STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO	80689090148	Ver Apêndice 1	Ver Apêndice 1

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

BD recebeu relatórios sobre o Venovo™ Sistema de Stent Venoso indicando que a extremidade proximal do stent não se expande imediatamente após a implantação, mas permanece conectada à almofada de stent no sistema de entrega. Uma ilustração da seção proximal aderida à almofada do stent pode ser vista abaixo na Figura 1.



Figura 2: A extremidade proximal do stent permanece conectada ao material da almofada do stent.

O escopo do recolhimento destes produtos inclui todos os lotes não expirados dos catálogos distribuídos mencionados no Apêndice 1.

IMPACTO CLÍNICO

Se a extremidade proximal do stent não se expandir imediatamente após a implantação, a manipulação excessiva ou forçada do sistema de distribuição de cateteres, bem como o uso de outros dispositivos ou técnicas intravasculares para auxiliar a expansão do stent, poderia potencialmente ter um grau variado de dano associado a ele. Os danos potenciais vão desde prolongar o procedimento, danificar ou deformidade do stent, lesão vascular potencial e/ou interrupção hemodinâmica que afeta o fluxo sanguíneo e/ou um evento trombótico. Nos casos em que o stent se auto-expandiu, não há risco incremental de dano.

Esta questão foi inicialmente observada na oferta de produtos de 14mm de diâmetro. Também foram relatadas reclamações em outros tamanhos de produtos ofertados. Até o momento, a BD recebeu aproximadamente 250 reclamações relatadas em vários tamanhos de produtos ofertados. A análise da causa raiz está avaliando a relação da almofada do stent e sua adesão ao stent como potencial fator contribuinte. Além disso, estudos investigativos de amostras de teste de sujeitos observaram traços de material de almofada (grau médico e silicone biocompatível) firmemente aderidos à superfície do stent apenas onde a almofada de stent entra em contato com o stent. A probabilidade dessa ocorrência ainda está sendo investigada.

De acordo com nossos registros de rastreabilidade, identificamos que V. Sra. adquiriu pelo menos uma unidade do(s) produto(s) referenciado(s) nesta carta. **Portanto, as seguintes providências devem ser tomadas:**

1. Imediatamente, verifique se ainda possui em seu estoque o(s) catálogo(s) e lote(s) informados. Caso possua, **descontinue o uso e sequeure** os mesmos para que a BD possa realizar a coleta;



2. Compartilhe essa notificação com outros usuários da sua instituição para assegurar que todos estejam cientes;
3. Preencha o formulário de resposta presente nesta notificação (Anexo 1) e envie-o ao seu distribuidor em no máximo 15 dias, a fim de que a BD tome conhecimento de que houve o recebimento desta notificação e possa proceder com o recolhimento dos produtos afetados e geração de nota de crédito, caso ainda possua unidades dos catálogos/lotos informados;
4. Notifique a BD sobre qualquer evento adverso ocorrido, que tenha relação com a situação descrita nesta notificação.

Adicionalmente, informamos que comunicaremos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, reafirmando nosso compromisso com a qualidade e segurança dos nossos produtos e respeito aos nossos clientes.

Caso necessite de qualquer assistência adicional, com relação a esta situação, por favor, entre em contato através do e-mail BRCR@bd.com ou pelo telefone (11) 5185-9987/9990.

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
A BD está comprometida em impulsionar o mundo da saúde. Nossos principais objetivos são a segurança dos usuários e pacientes e o fornecimento de produtos de qualidade aos nossos clientes.

Lamentamos qualquer inconveniente que esta situação possa ter causado e agradecemos a sua atenção desde já neste assunto.

Atenciosamente,



**Unidade de Tecnovigilância
Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas LTDA**



Anexo 1

FORMULÁRIO DE RESPOSTA DO CLIENTE SOBRE PRODUTO

Completar as duas páginas do Formulário e enviar ao seu distribuidor

Nome do Produto	Registro ANVISA/MS nº	Catálogo (Ref.)	Lotes
STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO	80689090148	Ver Apêndice 1	Ver Apêndice 1

1) Dados do responsável pelo preenchimento deste formulário

<input type="checkbox"/> Eu li e compreendi o conteúdo presente nesta notificação.	
<input type="checkbox"/> Eu compartilhei esta notificação com as pessoas da minha organização que têm relação com este tema.	
Nome:	
Cargo:	Departamento:
Telefone: ()	Email:
Assinatura:	Data:

2) Informações sobre possível recolhimento

- Não possuímos, em nosso estoque, mais nenhuma unidade do(s) catálogo(s) e lote(s) informados nesta notificação. Não é necessário preencher o item 2.1.
- Possuímos unidades em estoque do(s) catálogo(s) e lote(s) informados nesta notificação conforme informado abaixo e confirmo que as mesmas já estão segregadas para que sejam recolhidas:

Descrição do Produto	Catálogo (Ref.)	Lote nº	Quantidade em Estoque (unidades)

2.1) Dados do local de recolhimento dos produtos afetados

Razão Social da Instituição	
CNPJ:	Inscrição Estadual:
Endereço:	
Nº:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
Estado (UF):	CEP:

Apêndice 1: Lista de produtos impactados

Catálogo (Ref.)	Nome do Produto	Registro ANVISA/MS nº	Lotes
VENEM10040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 40 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm	80689090148	Todos os lotes dentro do prazo de validade
VENEM10060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 60 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 80 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 100 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 120 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 140 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM10160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 160 mm x 10 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 40 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 60 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 80 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 100 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 120 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 140 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM12160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 160 mm x 12 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 40 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 60 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 80 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 100 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 120 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 140 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM14160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOSO - Stent: 160 mm x 14 mm / Cateter: 80 cm		

**BD****BAARD***has joined BD*

Rua Alexandre Dumas, 1976

São Paulo, SP 04717-004

bd.com.br

Catálogo (Ref.)	Nome do Produto	Registro ANVISA/MS nº	Lotes
VENEM16040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm	80689090148	Todos os lotes dentro do prazo de validade
VENEM16060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM16160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 16 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM18160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 18 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20040	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 40 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20060	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 60 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20080	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 80 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20100	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 100 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20120	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 120 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20140	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 140 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		
VENEM20160	STENT VENOSO AUTO EXPANSÍVEL VENOVO - Stent: 160 mm x 20 mm / Cateter: 80 cm		