

# CARREGADOR SEM FIO PARA TERAPIA DBS MEDTRONIC


## MODELO WR9200 PARA DISPOSITIVOS RC ACTIVA™

### Guia Rápido

#### RECARGA DO SEU CARREGADOR



- 1 Conecte o cabo USB na base.
- 2 Conecte o cabo USB no adaptador de energia e conecte o adaptador em uma tomada na parede. A base deve ficar sobre uma superfície plana enquanto estiver conectada.
- 3 Coloque o carregador, com fundo para cima, dentro da base. Deixe seu carregador ligado à base entre as sessões de recarga para manter a carga total.  
**ATENÇÃO:** Se você estiver carregando seu recarregador pela primeira vez, é importante completar a carga sem retirar o carregador da base para retirar corretamente do modo de transporte.

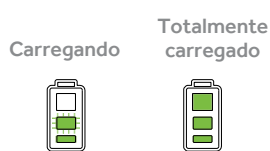


- 4 Quando seu recarregador estiver totalmente carregado, o ícone da bateria será exibido conforme mostrado na figura

#### EMPARELHAMENTO DO CARREGADOR AO APP

\*O aplicativo do carregador é opcional e não é necessário para carregar o implante

- 1 Ligue e destrave seu aparelho portátil
- 2 Abra o aplicativo do carregador tocando no ícone do app (📱)
- 3 Ligue seu carregador
- 4 No app do carregador, pressione **Connect**.

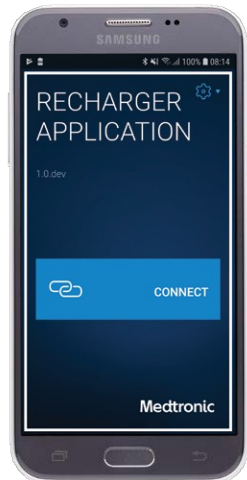

- 5 Pressione **Scan Code**.  
**Observação:** Pressione "Allow" (Permitir) no pop-up que solicita acesso à câmera, se necessário.

- 6 Aponte a câmera do aparelho para o código digitalizável no carregador, mantendo todo o código visível na tela do aparelho, até receber a confirmação no aparelho de que o emparelhamento está completo.

Para vídeos de tutoriais, visite [Medtronic.com/myDBSRecharger](https://www.medtronic.com/myDBSRecharger)

Veja instruções adicionais no verso.



Medtronic





MEDTRONIC  
TERAPIA DBS  
SEM FIO  
CARREGADOR  
MODELO WR9200  
PARA ACTIVA  
DISPOSITIVOS RC™  
Guia Rápido

ÁREA DE  
COLA

Together são marcas comerciais da Medtronic. Todas as outras marcas são marcas comerciais da empresa.  
© 2020 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, logotipo Medtronic e Further.  
Empresa Medtronic UC2020100935BEN

## RECARGA DE SEU IMPLANTE

Carregando      Totalmente Carregado

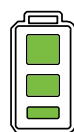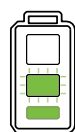

- 1 Verifique o nível da bateria do carregador e recarregue seu carregador, se necessário.

Veja "Recarga do seu carregador" no outro lado para instruções.



- 2 Coloque o carregador em seu campo cirúrgico ou cinto e posicione os dois círculos concêntricos sobre o campo cirúrgico e o carregador sobre o local do neuroestimulador.


**Observação:** Use o contrapeso ao usar o campo cirúrgico para equilibrar o carregador.

- 3 Ligue seu carregador. O carregador apitará até que seja conectado ao seu neuroestimulador.

## INDICADORES DO SEU CARREGADOR

Tom	Luz	Significado
Tom de bip repetitivo	Girando	Carregador está buscando o neuroestimulador
2 tons, aumentando o volume	Acesa	Neuroestimulador encontrado <b>Observação:</b> Se você ouvir 3 tons adicionais, veja o Indicador de Substituição Eletiva na linha seguinte.
3 tons no mesmo volume	Acesa	Indicador de Substituição Eletiva Consulte o programador do paciente ou manual do app de terapia do paciente para obter mais informações.
Nenhum	Pulsando normal	Carregando neuroestimulador
Série A de tons aumentando volume	Acesa	Sessão de carga concluída.
2 tons, baixando volume e repetitivo	Piscante	Neuroestimulador não encontrado <b>ou</b> Outro alerta/erro Verifique o app para mais informações
2 tons, baixando volume e repetitivo	Piscante	Bateria do carregador está baixa.

## USANDO O APP OPCIONAL DO CARREGADOR

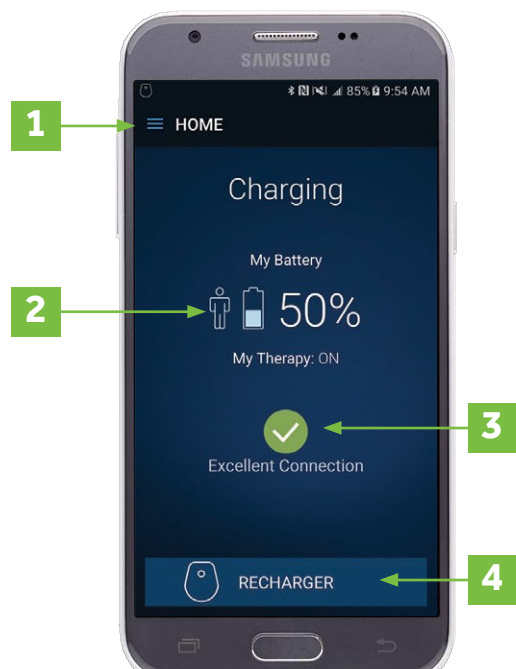

- 1 Botão **Menu** (☰) – Pressione para acessar as configurações de velocidade de carga e informações do app. O carregador está configurado para velocidade rápida como padrão.

- 2 Ícone **Bateria do Neuroestimulador** – Status da bateria do neuroestimulador. O número ao lado desta imagem indica o estado da carga da bateria do neuroestimulador.

- 3 Ícone de **Conexão** – Seu status de conexão entre o carregador e seu neuroestimulador.

- 4 Botão do **Carregador** – Pressione para visualizar o status da bateria do carregador e alterar o volume do seu carregador.