

STEALTHSTATION™ CRANIAL IMPRECISÃO DA REFERÊNCIA “DISTÂNCIA PARA O ALVO” Ressecção de Tumor, Colocação de Shunt, Procedimentos de Nexframe™ DBS




Uma anomalia foi identificada no software STEALTHSTATION™ CRANIAL nos tipos de procedimento de **Ressecção de Tumor, Colocação de Shunt e Nexframe™ DBS**. O software pode entrar em um estado em que a informação textual “Distância para/além do Alvo” não está mais sincronizada com o restante das informações de navegação disponibilizadas na tela e pode exibir um valor incorreto. Até que uma atualização de software seja disponibilizada, certifique-se de seguir as instruções abaixo para evitar navegações imprecisas:

EVITAR:

NÃO use a referência textual “Distância para/além do Alvo” durante a Ressecção do Tumor, a Colocação de Shunt e os procedimentos de Nexframe™ para DBS (destacados em vermelho no gráfico abaixo).

Todas as outras informações de navegação permanecem precisas.

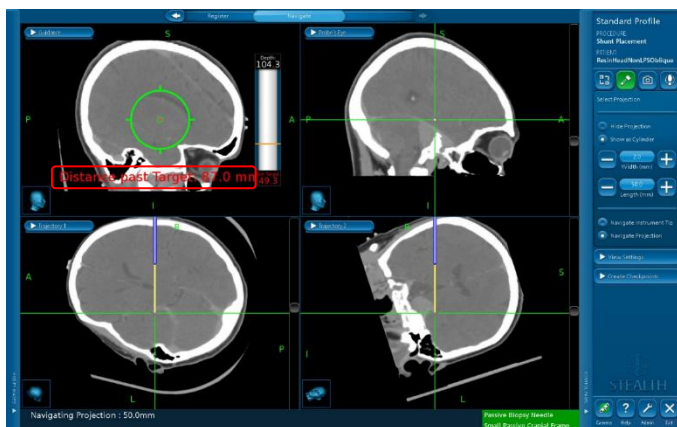

SEMPRE:

Confirme visualmente a precisão da navegação tocando em pontos anatômicos conhecidos.

Se a navegação do sistema parecer imprecisa e as etapas para restaurar a precisão não forem bem-sucedidas, interrompa o uso do sistema.

Se você tiver dúvidas relacionadas a esse problema, entre em contato com os Serviços Técnicos para obter ajuda pelo:

1-888-826-5603 ou RS.NAVTECHSUPPORT@MEDTRONIC.COM e Referência Comunicação do Cliente fornecida com FA1204.