

Instruções de Trabalho

FA1204

Medidor de Profundidade e Instalação da Placa de Instruções sobre as Etapas de Imprecisão do texto Distância do Alvo

Finalidade e escopo

Este procedimento fornece instruções para anexar o StealthStation™ S7/i7 Cranial Software v3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 Instalação da Placa de Instruções sobre as Etapas de Imprecisão do texto Distância do Alvo.

Aviso e precauções

Cuidado: A placa pode bloquear os ventiladores necessários para o bom funcionamento do sistema. Se um ventilador estiver bloqueado, o sistema pode superaquecer e parar de funcionar inesperadamente. Coloque a placa de modo que não bloqueie e não bloqueie nenhum ventilador.

Responsabilidade

É responsabilidade do Especialista Clínico da Medtronic ou Representante do Hospital anexar a placa para entender e seguir este procedimento. É responsabilidade daqueles que seguem este procedimento confirmar se é a revisão mais atual.

Peças necessárias

- StealthStation™ S7/i7 Cranial Software v3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 Placa de Etapas de texto de Distância Incorreta para o Alvo
- Anel de Fichário de 3 pol.




Instalando a placa

StealthStation™ S7/i7

1. Abra o anel de fichário
2. Passe o anel de fichário pelo orifício da placa.
3. Enrole o anel ao redor do trilho à esquerda do deck do carrinho de funcionários no StealthStation™ S7, conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1. Colocação de placa para o StealthStation™ S7/i7

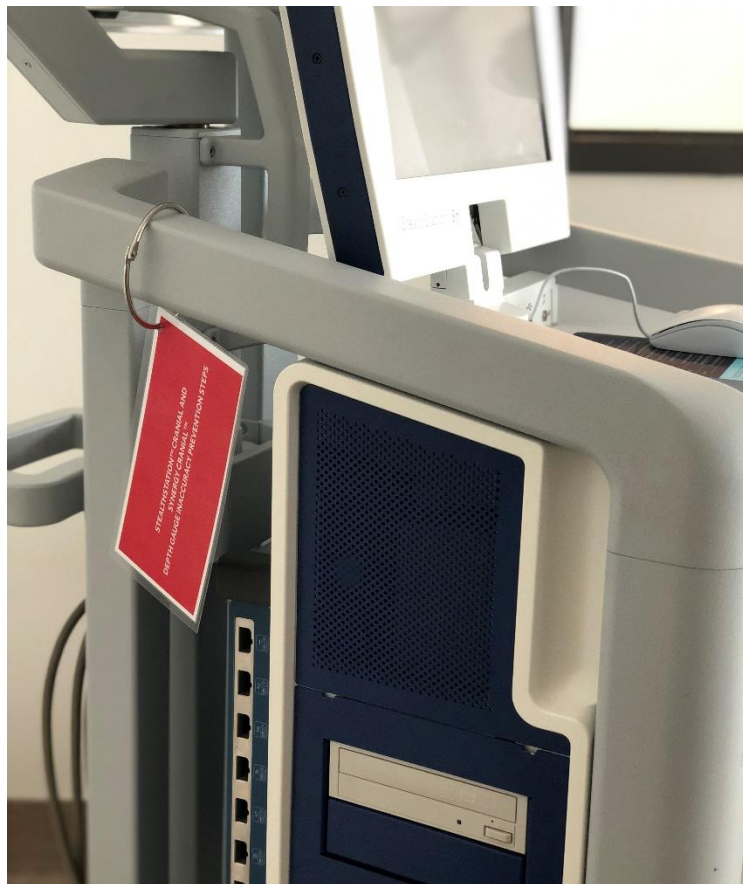

4. Feche o anel de fichário.
5. Confirme se a placa está firmemente presa ao StealthStation™ S7 e se o lado vermelho da placa está voltado para fora.

StealthStation™ i7/i7

1. Abra o anel de fichário
2. Passe o anel de fichário pelo suporte da placa.
3. Instale o anel ao redor da alça da lança ao lado da unidade de interface de navegação do StealthStation™ i7, conforme mostrado na Figura 2.
Se não houver alça de lança ou se este local bloquear o acesso a outros equipamentos, prenda o anel em volta do feixe de cabos da Unidade de Interface de Navegação, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 2. Colocação de placa para o StealthStation™ i7 (Cabo)



Figura 3. Colocação de placa para o StealthStation™ i7 (conjunto de cabos)



4. Feche o anel de fichário.
5. Confirme se a placa está firmemente presa à alça da prateleira da lança ou ao feixe de cabos StealthStation™ i7 NIU e se o lado vermelho da placa está voltado para fora.

Assistência

Se você tiver dúvidas sobre o StealthStation™ S7/i7 Cranial Software v3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 Instalação da Placa de Instruções sobre as Etapas de Imprecisão da Distância do Alvo, ligue para o Suporte Técnico da Medtronic Navigation no +1 800 595 9709 ou +1 720 890 3160 .