

Instruções para a Instalação da Plaqueta com Passos para Evitar a Imprecisão do Medidor de Profundidade

Objetivo e escopo

Este procedimento fornece as instruções para instalar a Plaqueta com Passos para Evitar a Imprecisão do Medidor de Profundidade do StealthStation™ Cranial e Synergy Cranial™.

Advertências e precauções

Cuidado: A plaqueta pode bloquear os ventiladores de resfriamento necessários para o funcionamento adequado do sistema. Se um ventilador for bloqueado, o sistema pode superaquecer e parar de funcionar inesperadamente. Posicione a plaqueta de modo que ela não possa bloquear nenhum ventilador.

Responsabilidade

O Especialista Clínico da Medtronic ou Representante do Hospital é responsável por instalar a plaqueta para compreender e seguir este procedimento. Esse profissional também é responsável por seguir este procedimento para confirmar que se trata da versão mais atualizada.

Peças necessárias

- Plaqueta com Passos para Evitar a Imprecisão do Medidor de Profundidade do StealthStation™ Cranial e Synergy Cranial™
- Argola Articulada de 3 polegadas



Instalação da plaqueta

StealthStation™ S7

1. Abra a argola articulada.
2. Passe a argola articulada através do orifício da plaqueta.
3. Passe a argola ao redor do corrimão à esquerda do deck do Carrinho da Equipe no StealthStation™ S7 conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1. Posicionamento da plaqueta para o StealthStation™ S7



4. Feche a argola articulada.
5. Confirme se a plaqueta está instalada firmemente no StealthStation™ S7 e se o lado vermelho da plaqueta está voltado para fora.

StealthStation™ i7

1. Abra a argola articulada.
2. Passe a argola articulada através do orifício da plaqueta.
3. Passe a argola ao redor da alça de extensão próxima da Unidade da Interface de Navegação do StealthStation™ i7 conforme mostrado na Figura 2.

Se não houver nenhuma alça de extensão, ou esse local bloquear o acesso ao equipamento, passe a argola ao redor do feixe de cabos da Unidade da Interface de Navegação conforme mostrado na Figura 3.

Instruções para Instalação da Plaqueta com Passos para Evitar a Imprecisão do Medidor de Profundidade do StealthStation™ Cranial e Synergy Cranial™

Figura 2. Posicionamento da plaqueta parao StealthStation™ i7 (Alça)



Figura 3. Posicionamento da plaqueta parao StealthStation™ i7 (Feixe de Cabos)



Instruções para Instalação da Plaqueta com Passos para Evitar a Imprecisão do Medidor de Profundidade do StealthStation™ Cranial e Synergy Cranial™

4. Feche a argola articulada.
5. Confirme se a plaqueta está instalada firmemente na alça de extensão do suporte ou no feixe de cabos da UIN do StealthStation™ i7, e se o lado vermelho da plaqueta está voltado para fora.

Assistência

Caso tenha dúvidas sobre a Instalação da Plaqueta com Passos para Evitar a Imprecisão do Medidor de Profundidade da Biópsia do StealthStation™ Cranial e Synergy Cranial™, [ligue para o suporte técnico da Medtronic Navigation no telefone +1 800 595 9709 ou +1 720 890 3160](#).