

PASSOS PARA EVITAR A IMPRECIÇÃO DO MEDIDOR DE PROFUNDIDADE DA BIÓPSIA DO STEALTHSTATION™ CRANIAL E SYNERGY CRANIAL™



Uma divergência foi identificada no software do STEALTHSTATION™ CRANIAL e SYNERGY CRANIAL™ no tipo de procedimento de biópsia. O software pode entrar em um estado no qual o Medidor de Profundidade da Biópsia não está mais sincronizado com o restante das informações disponibilizadas na tela e pode exibir uma posição incorreta da agulha de biópsia. Até que a atualização do software esteja disponível, certifique-se de seguir as instruções abaixo para evitar a ocorrência do problema:

EVITAR:

A Medtronic recomenda **NÃO** desativar a **Guidance View [Visão de Orientação]** após bloquear a trajetória da biópsia no software Cranial.

Após bloquear a trajetória da navegação da agulha de biópsia, **sempre** garanta que a **Guidance View [Visão de Orientação]** permaneça como uma visão ativa em pelo menos um quadrante do layout da tela.

RECUPERAR:

Se uma discrepância for detectada entre o gráfico do medidor de profundidade da biópsia e outras informações 2D:

Passo 1: Obstrua o campo de visão da câmera da agulha de biópsia ou da estrutura de referência para **provocar um status vermelho**.

Passo 2: **Retorne para o status verde** deixando de obstruir o campo de visão da câmera da agulha de biópsia e da estrutura de referência.

Passo 3: Utilize o ícone **Cycle Views [Revezar Visões]** para atualizar a visão de orientação e confirmar se o gráfico do medidor de profundidade da biópsia corresponde aos valores da distância até o alvo e às informações da posição até o alvo fornecidos pela intersecção das linhas 2D.

Passo 4: **Confirme visualmente a precisão** antes de continuar com a navegação.



SEMPRE:

Confirme visualmente a precisão da navegação e se o gráfico do medidor de profundidade da biópsia corresponde aos valores da distância até o alvo e às informações da posição até o alvo fornecidos pela intersecção das linhas 2D, que representam a posição da ponta do instrumento navegado.

Utilize a Biopsy Needle Mechanical Depth Stop [Parada Mecânica da Profundidade da Agulha da Biópsia].

Se a navegação do sistema parecer imprecisa e os passos para restaurar a precisão forem malsucedidos, aborte o uso do sistema.

Caso tenha dúvidas relacionadas a esse problema, entre em contato com os Serviços Técnicos no: 1-888-826-5603 ou RS.NAVTECHSUPPORT@MEDTRONIC.COM e consulte o Comunicado ao Cliente fornecido com o FA1204.