

Apêndice A

O autoteste manual do Aplicador de Clip permitirá que os usuários descubram se há um problema de engate com os discos de aperto antes do uso. Este teste é realizado movendo as garras do Aplicador de Clip através de toda a faixa de movimento de guinada (lado a lado no plano das garras do instrumento) e observando o movimento de ambas as garras do instrumento antes de colocar um clip em torno de um vaso/tecido. Este teste deve ser realizado em um espaço aberto para evitar quaisquer colisões.


Critério de aprovação

- Durante o movimento de guinada, **se as garras permanecerem abertas** sem observação de fechamento das garras, o instrumento passa no autoteste e os usuários podem prosseguir com o uso do instrumento aplicador de clip em um procedimento.


Critérios de Reprovação

- Durante o movimento de guinada, **se as garras começarem a fechar** em oposição às garras que permanecem abertas, existe o potencial de que um dos discos de garra não esteja engatado. O instrumento deve ser removido, reinstalado e inspecionado quanto ao engate.


Se o autoteste falhar, remova o instrumento Aplicador de Clip, reinstale e repita o autoteste. Se falhar novamente, use um instrumento Aplicador de Clip diferente e devolva o instrumento usando o processo de retorno para análise padrão da Intuitive (RMA). Contacte o atendimento ao cliente para devolver o produto afetado usando o número local apropriado listado na seção 6 da carta. O crédito será emitido quando a proposta inesperada relatada for confirmada.

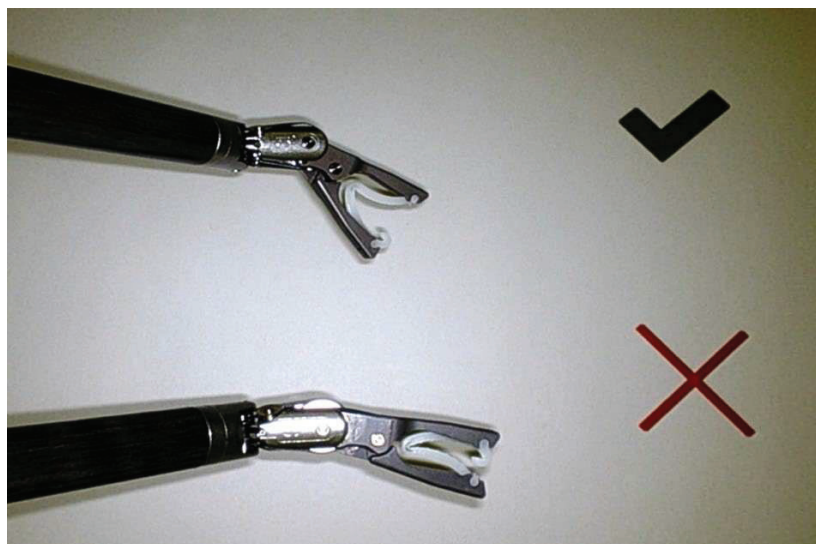

Aplicador de Clip grande

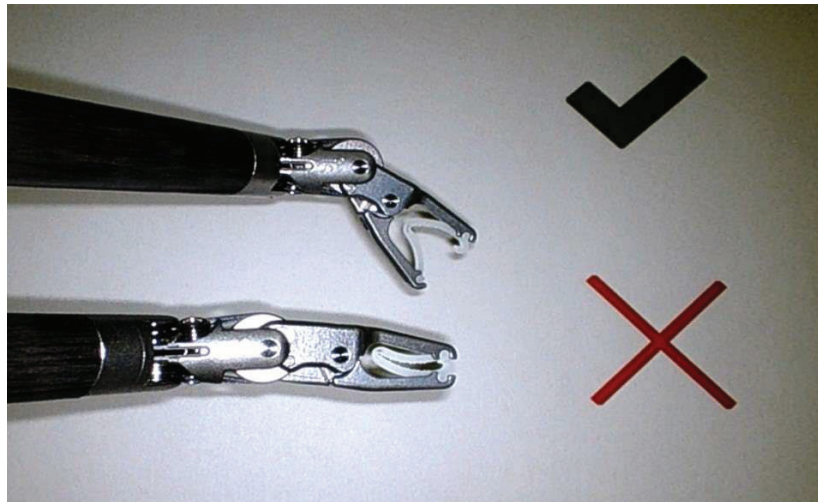

Aplicador de Clip médio-grande

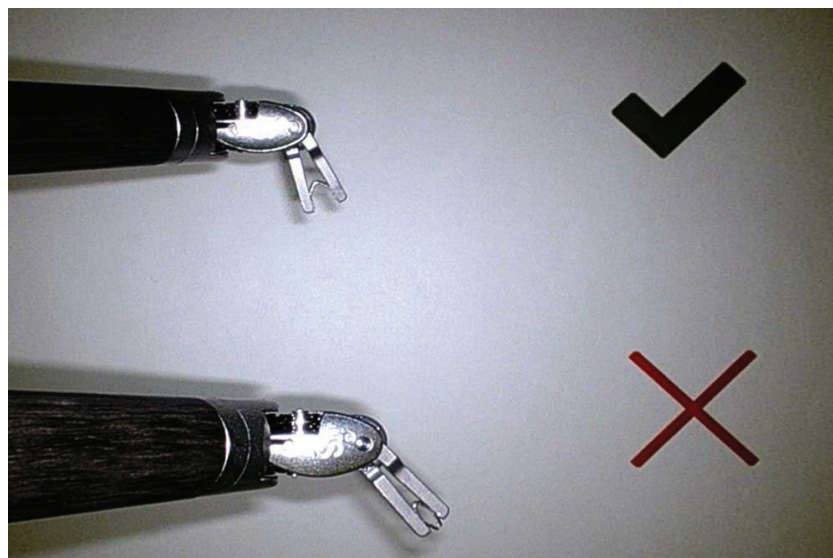

Aplicador de Clip pequeno