

Guia sobre a Vida Útil do Instrumento

Este guia inclui as instruções atualizadas sobre (1) como identificar se um instrumento pode ser utilizado em um procedimento e (2) quando o instrumento deve ser substituído durante o procedimento. Observe que uma ação diferente pode ser necessária dependendo do tipo do instrumento.

Conectando um Instrumento

Quando um instrumento é conectado a um braço, a tela do braço exibirá o nome do instrumento, além da vida útil atual do instrumento no canto inferior esquerdo da tela. O % de uso exibido reduzirá ao longo da vida útil do instrumento e pode ser utilizado para monitorar o status da vida útil do instrumento.



Ao conectar um instrumento que esteja próximo do fim da vida útil, o sistema exibirá uma mensagem informando que se trata do último procedimento para o instrumento conectado. Anote o instrumento e realize a seguinte ação com base no tipo do instrumento:




Instrumento	Descrição	Ação
MRASI0001	Tesoura Curva Monopolar	Toda Tesoura Curva Monopolar indicando vida útil de 0% não deve ser utilizada. Descarte o instrumento imediatamente e substitua-o se necessário.
MRASI0004	Pinça Fenestrada Bipolar	O instrumento pode ser utilizado ao longo do procedimento. Descarte-o no final do procedimento.
MRASI0005	Fórceps Maryland Bipolar	
MRASI0006	Condutor de Agulha Grande	
MRASI0007	Condutor de Agulha Extragrande	
MRASI0010	Fórceps Cadiere Seguro	
MRASI0011	Fórceps Cadiere	
MRASI0012	Pinça Fenestrada Dupla	

MRASI0016	Pinça Dentada	
-----------	---------------	--

Notificação da Expiração

Quando um instrumento atingir o fim da sua vida útil durante um procedimento, uma notificação da expiração do instrumento é exibida no display do console do cirurgião e display da Torre, orientando o usuário a descartar o instrumento expirado no final do procedimento.

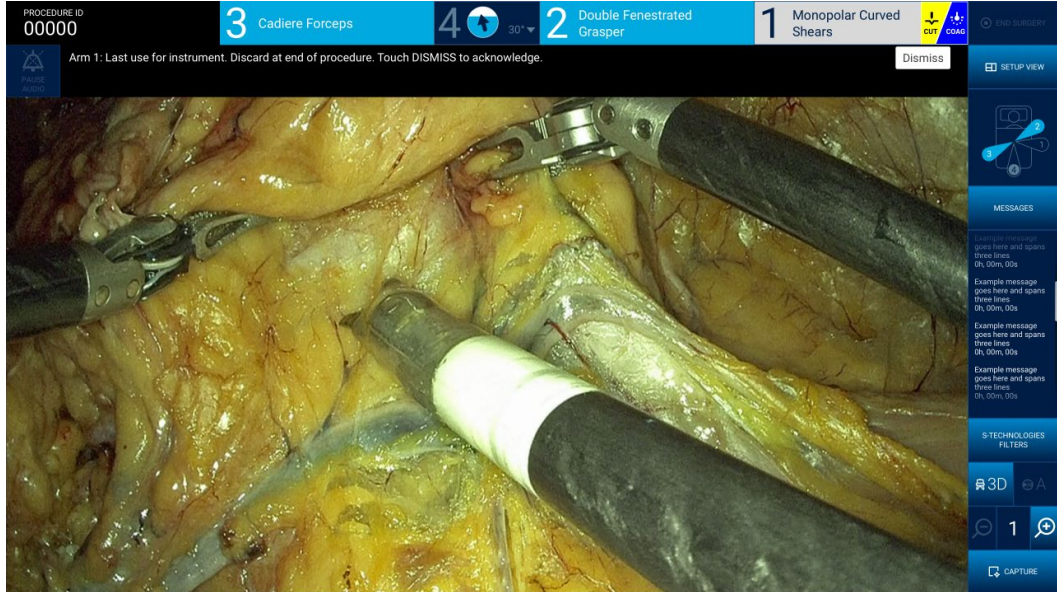

No caso de uma notificação da expiração do instrumento, não ignore a notificação. Em vez disso, realize os seguintes passos:

1. Identifique qual braço acionou a notificação da expiração do instrumento. Essa informação está incluída na mensagem da notificação.
2. Utilize a Barra de Status do Braço para identificar qual instrumento expirou. Anote o instrumento e realize a seguinte ação com base no tipo do instrumento:


Instrumento	Descrição	Ação
MRASI0001	Tesoura Curva Monopolar	Toda Tesoura Curva Monopolar que indicar 0% atingiu o fim da sua vida útil. Após receber a notificação da expiração, descontinue o uso da Tesoura Curva Monopolar. Um tempo reserva de 10 minutos é alocado para permitir a conclusão da tarefa cirúrgica e a retirada segura do instrumento. Substitua o instrumento expirado, se necessário.
MRASI0004	Pinça Fenestrada Bipolar	
MRASI0005	Fórceps Maryland Bipolar	

MRASI0006	Condutor de Agulha Grande	O instrumento pode ser utilizado ao longo do procedimento. Descarte-o no final do procedimento.
MRASI0007	Condutor de Agulha Extragrande	
MRASI0010	Fórceps Cadiere Seguro	
MRASI0011	Fórceps Cadiere	

Instrumento	Descrição	Ação
MRASI0012	Pinça Fenestrada Dupla	O instrumento pode ser utilizado ao longo do procedimento. Descarte-o no final do procedimento.
MRASI0016	Pinça Dentada	

A vida útil atual de um instrumento pode ser confirmada por meio da verificação da tela do braço correspondente. O % de uso exibido reduzirá ao longo da vida útil no instrumento e pode ser utilizado para monitorar o status da vida útil do instrumento.

©2021 Medtronic. Todos os Direitos Reservados.

 Covidien Inc. 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 EUA.
Medtronic e o logo da Medtronic são marcas comerciais da
Medtronic. Todas as outras marcas são marcas comerciais de uma
empresa Medtronic.


Caution, consult
accompanying documents



Hugo™ VAS System e todos os outros são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.

Medtronic