

Addendum

FIBROSCÓPIO DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL, VIDEOSCÓPIO DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL

Modelos:

LF-TP
LF-DP
LF-GP
LF-V
LF-P

Observação: a disponibilidade do produto depende do país

1 Instruções

As seções abaixo fornecem informações atualizadas sobre o diâmetro da seção de inserção nas especificações e as precauções antes de utilizar endoscópios com cânula endotraqueal. As alterações estão resumidas abaixo e são indicadas por um texto sublinhado nas seções subsequentes deste Adendo. As outras partes do manual de instruções não foram alteradas.

Nº 1 As precauções antes de utilizar endoscópios com cânula endotraqueal foram atualizadas no Capítulo "Informações importantes – Ler antes de utilizar" na seção "Advertências e precauções".

Nº 2 O diâmetro máximo de inserção foi adicionado às especificações no Capítulo 2, "2.2 Especificações".

2. Precauções em "Informações importantes – Ler antes de utilizar"

Precauções

- Antes de introduzir o endoscópio de intubação traqueal com uma cânula endotraqueal em um paciente, deslize a cânula ao longo de todo o comprimento da seção de inserção do endoscópio de intubação traqueal para verificar se a seção de inserção do endoscópio de intubação traqueal pode ser introduzida com suavidade na cânula endotraqueal. Se ela não puder ser introduzida com suavidade, o material de cobertura da seção flexível do endoscópio de intubação traqueal ou a superfície externa da seção de inserção poderá ser danificada. Quando usar um lubrificante, efetue as verificações acima referidas antes de aplicar o lubrificante.

3 "Especificações" no Capítulo 2.2 Especificações

Nº do modelo	Especificações		
	(a) Diâmetro externo da extremidade distal (mm)	(b) Diâmetro externo do tubo de inserção (mm)	<u>(c) Diâmetro externo máximo do tubo de inserção (mm)</u>
LF-TP	5,1	5,2	<u>5,95</u>
LF-DP	3,1	3,1	<u>3,4</u>
LF-GP	3,8	4,1	<u>4,5</u>
LF-V	3,8	4,1	<u>4,5</u>
LF-P	1,8	2,2	<u>2,4</u>