

**PHILIPS**

**Adendo**

Português

# Instruções para o pedal

Versão do documento 1.0



# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Sobre o sistema</b>	<b>6</b>
2.1	Equipamento na sala de exame	6
2.1.1	Pedal	6
<b>3</b>	<b>Manutenção</b>	<b>7</b>
3.1	Teste de verificação do usuário	7



# 1 Introdução

Este documento é um adendo às seguintes instruções de uso:

- Série Allura Xper FD e família AlluraClarity versão 7.x
- Série Allura Xper FD e família AlluraClarity versão 8.x
- Série UNIQ e família UNIQ Clarity versão 1.x
- Allura Centron versão 1.x
- Azurion versão 1.x
- Azurion versão 2.x
- Azurion versão 3.0

Todas as seções neste documento são uma adição às instruções de uso. Para orientação do usuário clínico, há uma declaração de aplicabilidade no início de cada seção.

Para uma descrição completa do sistema, consulte as instruções de uso incluídas com o seu sistema de raio-X.

## 2 Sobre o Sistema

### 2.1 Equipamento na Sala de Exame

#### 2.1.1 Pedal

*Esta seção é um adendo a todas as instruções de uso.*



#### **ATENÇÃO**

***Se um pedal (versão com fio ou sem fio) ou o cabo do pedal apresentar mau funcionamento, isso pode interromper um procedimento que está em andamento. Caso isso ocorra, você pode continuar com a captando imagens usando um interruptor alternativo de ativação de raio-X, como um pedal ou interruptor manual (para exposição) na sala de controle.***

Evite passar com outros dispositivos ou equipamentos por cima do cabo do pedal.

#### **OBSERVAÇÃO**

***Ao usar um pedal de acionamento com fio, um pedal adicional pode ser instalado antecipadamente na sala de exames, garantindo que haja um interruptor de ativação alternativo para o raio-X disponível caso o primeiro pedal falhe.***

## 3 Manutenção

### 3.1 Teste de Verificação do Usuário

*O texto e as etapas seguir são adicionais a todas as instruções de uso.*

Faça o seguinte teste de verificação todos os dias antes de usar o sistema. Se encontrar algum dano ou se alguma etapa falhar, pare imediatamente de usar o sistema e entre em contato com o suporte técnico.

- 1 Inspeção o pedal e o cabo do pedal em relação a danos, como rasgos, cortes ou abrasões,
- 2 Inspeção o pedal para verificar se há uma conexão adequada do pedal ao sistema.
- 3 Teste todos os pedais em todos os pedais conectados para verificar se estão funcionando corretamente.



© Koninklijke Philips N.V., 2023. Todos os direitos reservados.  
A reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, elétrico, mecânico ou outro, é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais.

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)

----- \* 2023-07



Este dispositivo médico está em conformidade com os requisitos aplicáveis estabelecidos pela União Europeia, conforme demonstrado na Declaração de Conformidade.

**Endereço do fabricante**  
Philips Medical Systems Nederland B.V.,  
Veenpluis 6  
5684 PC Best,  
Países Baixos