

Instruções de inspeção visual de equipos Exactamix

1.0 Descrição do produto de entrada de dispositivo de composição automatizada:

Existem 4 configurações diferentes de produtos de entrada de dispositivo de composição automatizada (entrada descartável). Cada produto de entrada descartável inclui tubos com diferentes componentes fixados em cada extremidade. Os equipos descartáveis são selados dentro de uma embalagem primária (filme transparente de um lado e Tyvek branco opaco do outro lado). Os equipos descartáveis são estéreis. Veja as fotos do produto abaixo.



(As imagens acima são mostradas sem tampas para mostrar os diferentes componentes finais.)

Exemplos de produtos de entrada com tampa (sem embalagem)



Instruções de inspeção visual de entrada de dispositivo de composição automatizada



Exemplo de entrada com tampa (com embalagem e etiqueta da unidade)



2.0 Instruções de inspeção visual para material particulado:

Execute a inspeção visual em cada equipo descartável da seguinte forma:

1. Pegue a embalagem primária de equipo descartável em suas mãos.
2. Sem abrir a embalagem, verifique cada produto, inclusive embalagem primária, tubulação, conectores e ponteiros, por pelo menos 5 segundos a uma distância de aproximadamente 12

Instruções de inspeção visual de entrada de dispositivo de composição automatizada

polegadas (30 centímetros) para partículas visíveis a olho nu. O uso de ampliação ou fontes de luz alternativas não é necessário para esta inspeção.

3. As partículas visíveis identificadas incluem, mas não estão limitadas a pontos pretos aderidos, manchas, fibras e partículas soltas, visíveis a olho nu, dentro ou fora do próprio equipo descartável, ou dentro da embalagem do produto.
4. Se forem encontradas partículas visíveis, não utilize o equipo descartável. Siga as instruções fornecidas na carta do cliente da Baxter. Você pode continuar a usar o equipamento **ExactaMix** com outros equipos descartáveis que foram inspecionados de acordo com as instruções acima, sem identificação de material particulado.



Assinado eletronicamente por: Thais
Emboaba de Oliveira
Motivo: Aprovado
Data: 2 de setembro de 2024 11:14
ADT

Thais Emboaba de Oliveira
Responsável Técnica
Baxter Hospitalar Ltda.



Assinado eletronicamente por: Thais De
Quintal Gouveia
Motivo: Aprovado
Data: 2 de setembro de 2024 13:00
ADT

Thais de Quintal Gouveia
Gerente de Marketing
Baxter Hospitalar Ltda.