

Aos nossos clientes dos equipamentos de anestesia Atlan

Outubro de 2024

Aviso de segurança importante!

Eventual falha da ventilação automática devido a possível falha no pistão eletrônico.

Isso afeta 80 unidades dos equipamentos de anestesia modelo Atlan (números de série na lista anexa). OUTROS APARELHOS DE ANESTESIA NÃO FORAM AFETADOS!

Prezados clientes,

No decorrer de nossa vigilância de mercado global, tomamos conhecimento de casos em que os equipamentos de de anestesia Atlan indicaram uma falha no pistão antes do uso ou sofreram uma falha durante o uso. Até o momento, não houve nenhum relato de lesões em pacientes. Nossas investigações revelaram que os casos se devem a um erro causado por um desvio temporário no processo de montagem de um determinado lote de equipamentos. Isso afetou apenas os equipamentos de anestesia Atlan com os números de série mencionados.

Se este erro ocorrer antes do uso, no modo de espera ou de teste do sistema, a ventilação mecânica não poderá ser iniciada. Se o erro ocorrer durante o uso no paciente, a ventilação mecânica poderá falhar, e o equipamento soar a mensagem de alarme "Falha no ventilador!!!". Se necessário, você pode desativar a mensagem de alarme pressionando a tecla "ALARM RESET". Nesse caso, a ventilação manual ou a respiração espontânea continuam sendo possíveis. Será necessário ventilar manualmente o paciente para evitar lesões. Mesmo com a falha no ventilador, o Atlan continua a fornecer o modo de ventilação Man/Spon, que garante a administração de fluxo de gás fresco e agente anestésico, bem como todas as funções de monitoramento, sem restrições. Consulte as instruções de uso ou entre em contato com o seu representante da Dräger para obter instruções, caso necessário.

Nosso serviço Dräger entrará em contato com os clientes afetados e marcará um horário para a substituição do pistão gratuitamente. **Não há qualquer restrição de uso para equipamentos não listados nesse aviso. Caso seu equipamento esteja listado nesse aviso, utilize seu equipamento observando as instruções de uso e orientações indicadas acima.**

Certifique-se de que todos os usuários do equipamento de anestesia Atlan, bem como outras pessoas envolvidas em sua organização, estejam cientes deste importante Aviso de Segurança. Preencha e devolva o cartão de resposta anexo para confirmação de recebimento. Se você tiver disponibilizado os produtos a terceiros, encaminhe uma cópia deste Aviso de Segurança a eles. Guarde este importante Aviso de Segurança pelo menos até que o motor seja substituído. A Dräger notificou as autoridades responsáveis sobre essa ação. Em breve será publicado.

Gostaríamos de agradecer pelo apoio e pedir desculpas por qualquer incômodo que esta medida possa ter causado. Foram medidas instituídas para reforçar o compromisso e a responsabilidade da marca Dräger.

Em caso de dúvidas, por favor entre em contato com o telefone **11 4689-4900** (segunda a sexta, das 08:15 as 17:45) ou através do e-mail relacionamento@draeger.com

Com os melhores cumprimentos,

Mariana Jobbi

Mariana Gabbi
Gerente de Serviços

Daniel Dolci

Daniel Dolci
Gestão de Produtos