

Aos nossos clientes dos equipamentos Atlan

Agosto de 2025

### **Aviso de segurança importante!**

#### **Possível falha da ventilação relacionada ao sistema eletrônico do motor.**

**Este fato pode estar presente em uma quantidade limitada de equipamentos do modelo Atlan comercializados no Brasil e afeta apenas os equipamentos informados na lista anexa. Equipamentos que não constam nessa lista NÃO foram afetados e podem continuar sendo utilizados normalmente.**

Prezados clientes,

No decorrer de nossa vigilância global do mercado, tomamos conhecimento de casos em que as estações de trabalho de anestesia modelo Atlan apresentaram uma falha no pistão antes da utilização ou durante a ventilação. Até ao momento não foram registados quaisquer casos com lesões para os pacientes.

Informamos que identificamos uma possível falha na ventilação automática de determinados equipamentos de anestesia Atlan devido à presença de poeira na eletrônica do motor. Esta condição pode causar falha da ventilação mecânica, sendo que **apenas equipamentos com determinados números de série (anexo) foram afetados.**

**Se o erro ocorrer antes da utilização, por exemplo em standby ou no teste do sistema, a ventilação automática pode não ser iniciada. Se o erro ocorrer durante um procedimento em curso, a ventilação automática pode falhar e o equipamento emite um alarme com a mensagem “Falha no ventilador!!!”. Em ambos os casos a ventilação manual ou espontânea continua a ser possível, mas pode ser necessário ventilar o paciente manualmente para evitar lesões. Mesmo com o alarme de falha de ventilação, o Atlan continua a fornecer o modo de ventilação Man/Spon, assim como a dosagem de gás fresco, a medicação e todas as funções de monitorização sem restrições.**

**Ressaltamos que é fundamental que todo equipamento Atlan seja testado diariamente antes do uso em pacientes, conforme as instruções de uso.**

Nosso serviço Dräger entrará em contato com você e marcará um horário para a avaliação. E a substituição do motor, quando indicada, será realizada gratuitamente.

Somente será necessário substituir motores que contenham as seguintes codificações: **2445 / 2446 / 2451 / 2502 / 2509**

**Até lá, continue operando seus equipamentos com o cuidado habitual, usando-o sob supervisão permanente, de acordo com as instruções de uso do Atlan.**

Lamentamos qualquer inconveniente que isso possa causar.

Certifique-se de que todos os usuários do modelo Atlan, bem como outras pessoas envolvidas em sua organização, estejam cientes deste importante Aviso de Segurança.

Pedimos gentilmente que preencha e devolva o cartão de resposta em anexo para confirmar o recebimento.

Caso você tenha disponibilizado os produtos a terceiros, encaminhe uma cópia deste importante Aviso de Segurança para eles.

Guarde este "Aviso de Segurança" pelo menos até que o motor seja avaliado.

As autoridades responsáveis foram notificadas sobre essa ação.

Gostaríamos de agradecer pelo apoio e pedir desculpas por qualquer incômodo que esta medida possa ter causado. Foram medidas instituídas para reforçar o compromisso e a responsabilidade da marca Dräger.

Em caso de dúvidas, por favor entre em contato com o telefone **11 4689-4900** (segunda a sexta, das 08:15 as 17:45) ou através do e-mail [relacionamento@draeger.com](mailto:relacionamento@draeger.com)

### Anexo - Lista de equipamentos possivelmente afetados.

Modelo	Código	Número de série
Atlan A100	8621100	ASUB-0166
Atlan A100 XL	8621200	ASUB-0079
Atlan A100 XL	8621200	ASUB-0080
Atlan A100 XL	8621200	ASUB-0084
Atlan A100 XL	8621200	ASUB-0085
Atlan A100 XL	8621200	ASUB-0086
Atlan A100 XL	8621200	ASUB-0087
Atlan A300	8621300	ASUD-0151
Atlan A300	8621300	ASUD-0152
Atlan A300	8621300	ASUD-0153
Atlan A300	8621300	ASUD-0154
Atlan A300	8621300	ASUD-0155
Atlan A300	8621300	ASUD-0156
Atlan A300	8621300	ASUD-0169
Atlan A300	8621300	ASUD-0170
Atlan A300	8621300	ASUD-0171
Atlan A300	8621300	ASUD-0172
Atlan A300	8621300	ASUD-0214
Atlan A300	8621300	ASUD-0215
Atlan A300	8621300	ASUD-0216
Atlan A300	8621300	ASUD-0217
Atlan A300	8621300	ASUD-0232
Atlan A300	8621300	ASUD-0233
Atlan A300	8621300	ASUD-0234

Atlan A300	8621300	ASUD-0235
Atlan A300	8621300	ASUD-0236
Atlan A300	8621300	ASUD-0237
Kit Ventilator, assembly	8621410	ASUA-0726
Kit Ventilator, assembly	8621410	ASUA-0727
Kit Ventilator, assembly	8621410	ASUD-0085
Atlan A350	8621500	ASUB-0074
Atlan A350	8621500	ASUB-0075
Atlan A350	8621500	ASUB-0076
Atlan A350	8621500	ASUB-0077

Com os melhores cumprimentos,

*Mariana Gabbi*  
Mariana Gabbi  
Gerente de Serviços

*Daniel Dolci*  
Daniel Dolci  
Coordenador de Produtos